

エステームボディ™

EsteemBody™

漏れない生活のために

一人ひとり異なる体型とストーマタイプに対応するように
長年の実績がある皮膚保護剤と積み重ねられたエビデンスを基に
設計された新しい軟性凸面型の単品系ストーマ装具
エステームボディ™。

漏れを防ぐ3つの特長

1

洗練された
装具の
デザイン

2

耐久性があり
皮膚に優しい
皮膚保護剤

3

さまざまな
体型に合う
凸面型装具

エステームボディ™
特設サイト



友だち募集!
コンパテックLINE



エステームボディ™ (消化管用)



お腹側 外側(透明) 外側(窓付)



貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

凸の深さ 3.5mm

カスタムカット

注文番号	ストーマサイズ	入数	本体価格*
423654	10-25mm		
423653	透明 10-35mm	10枚	8,490円
423652	10-45mm		
423651	10-55mm		

プレカット

注文番号	既製孔サイズ	入数	本体価格*
423646	25mm		
423647	窓付 30mm	10枚	8,490円
423648	35mm		

凸の深さ 7mm

カスタムカット

注文番号	ストーマサイズ	入数	本体価格*
423667	10-25mm		
423666	透明 10-35mm	10枚	9,490円
423665	10-45mm		
423664	10-55mm		

プレカット

注文番号	既製孔サイズ	入数	本体価格*
423659	25mm		
423660	窓付 30mm	10枚	9,490円
423661	35mm		

エステームボディ™ウロ (尿路用)



お腹側 アダプター 外側(透明) 外側(窓付)



貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

凸の深さ 3.5mm

カスタムカット(アダプター2個付)

注文番号	ストーマサイズ	入数	本体価格*
423714	10-25mm		
423713	透明 10-35mm	10枚	10,790円
423712	10-45mm		

プレカット(アダプター2個付)

注文番号	既製孔サイズ	入数	本体価格*
423706	15mm		
423707	20mm		
423708	窓付 25mm	10枚	10,790円
423709	30mm		
423710	35mm		

凸の深さ 7mm

カスタムカット(アダプター2個付)

注文番号	ストーマサイズ	入数	本体価格*
423727	10-25mm		
423726	透明 10-35mm	10枚	10,990円
423725	10-45mm		

新製品!!

エステームボディ™

あらゆるBodyによりそい、密着

エステームボディ™(消化管用)
エステームボディ™ウロ(尿路用)



エステームボディ™ 漏れを防ぐ3つの特徴

1 Design 洗練された装具のデザイン

さまざまなシーンを 考慮した素材

撥水性のある素材で入浴や水泳でも安心です。



温かみのある 「ウォームグレー」


衣服に透けにくく、肌との色の差が出ないように開発されています。



新たなデザインコンセプトによる ストーマ袋の形状

消化管用

独特な8の字型形状がストーマ袋の膨らみを抑えます。

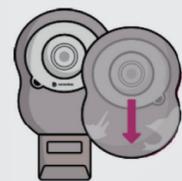

尿路用

新たな仕切り構造でストーマ袋の膨らみを軽減します。



進化した排出口デザイン



消化管用

操作しやすい設計の排出口

排出口を格納できる

排出口を折りたたむと格納でき、鼠径部にあたらずに使用できます。窓付のストーマ袋の場合、排出口が織布内に格納され、すっきりします。

操作・排出が簡単

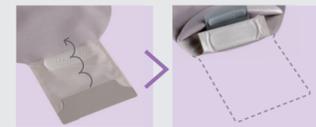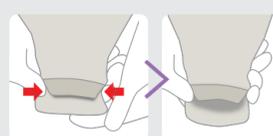

プレート両端のくぼみ位置に指を合わせます。

排出口を開きます。


ウロ(尿路用)

柔らかいソフトタップ排出口、 水抜け機能も備えています。

柔らかいソフトタップ排出口

水切りもできる
V字の切り込み付き

入浴時などに織布の内側に水が入っても、V字の切り込みがあるため、簡単に絞り出して排水することができます。

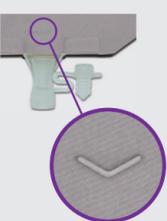

2 Skin Barrier 耐久性があり皮膚に優しい 皮膚保護剤

排泄物が水様性の方にもお薦め

デュラヘーシブ®皮膚保護剤は耐久性に優れており、水様性排泄物の方にもお薦めです。皮膚保護剤が水分を吸収し、膨潤する「タートルネック作用」により、ストーマにフィットし隙間を塞ぎます。



3 Convexity さまざまな体型に合う凸面型面板

広範囲に適する軟性凸面型面板



使用者様の声

- 装具の肌に触れる部分の素材が柔らかくて肌なじみがすごくいい。
- 織布の水の弾きが良く、すぐに乾くのでとても良い。
- 圧迫感やツツパリ感が少なくなりました。

エステームボディの使用者インタビューを右記のQRコードからご覧ください。



製品サンプルリクエスト用紙

本用紙でお申込みの方には、エセンタ™粘着剥離剤ワイプサンプル2枚をお付けします。
*同一サンプルを複数回提供する事はできません。ご了承ください。

フリガナ	生年月日	年	月	日
お名前	電話番号			
〒				
ご住所				
メールアドレス 後日、使用感についてのアンケートをお送りします。回答にご協力ください。	@	コンバテックme+™クラブの入会登録を希望する (後日、担当者がご連絡いたします)		
手術を受けた病院				
手術を受けた年月日				
ストーマ外来に通っている: <input type="checkbox"/> はい (手術した病院と違う場合: 病院名) <input type="checkbox"/> いいえ				
ストーマのタイプ ※ダブルストーマの方は両方にチェック: <input type="checkbox"/> 消化器系ストーマ <input type="checkbox"/> 尿路系ストーマ				
ストーマのサイズ: 縦 mm × 横 mm × 高さ mm				
注文番号 (製品リストよりお選びください) ※ダブルストーマの方は2つご記入ください				
コンバテック 営業担当者名		販売店名		

ご記入後、下記のいずれかの方法でお申し込みください。

1 ファックスで送る。 FAX番号: 03-6832-9891	2 郵送する。封筒に入れ、 本紙裏表紙に記載の住所にお送りください。	3 メールで送る。記入した申込書をスマートフォンで撮影し、右記QRコードまたは jp-cvt-csfax@convatec.comまでお送りください。
---------------------------------------	---------------------------------------	--

コンバテックはお客様の情報を大切に預かります。ご記入いただきました個人情報は、サンプルの発送、使用感アンケートの依頼及び製品、サービスのご案内に利用いたします。皆様の情報は弊社にて厳重に管理し、売却・貸出・譲渡いたしません。

コンバテックme+™クラブ

コンバテックとともに
安心して日常生活を送りませんか?

サポートプログラムメニュー

お悩み相談

コンバテック
me+™クラブ通信

知恵袋

動画

ご入会いただきますと

お出かけに便利な
トラベルポーチ
を差し上げます。

※ストーマ保有者1人に1つになります。
※写真は例です。装具やアクセサリ製品は含まれません。



サイズ:
横21cm×18cm×
厚み3cm

こちらのQRコードから
入会できます。

