

コンバテックストーマ用品 総合カタログ 2025年-

Convatec
Ostomy supplies Catalogue
2025-

コンバテックストーマ用品 総合カタログ 2025年- Convatec Ostomy supplies Catalogue 2025-



コンバテック ジャパン株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-7

お客様相談窓口
☎ 0120-532384
<https://www.convatec.com/ja-jp/>



コンバテックのビジョン

私たちが携わる

すべての皆さまの生活をより良くするために

信頼されるメディカルソリューションの

先駆者でありつづけます

C O N T E N T S

目次

コンバテックの歴史		3
エステームボディ™		4
	リーク ディフェンス™の特長	6
	● 面板	7
	● 皮膚保護剤	8
	● デザイン	9
製品特長	● コンバテック モルダブル テクノロジー™	12
	● ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ	14
	● コンバテックの皮膚保護剤	16
	● コンバテックの面板の構造・形状	17
コンテンツサービス	コンバテックme+™クラブ	18
	公式SNS情報発信サービス	20
	ストーマ装具早見表	22
製品紹介	単品系ストーマ装具	24
	● エステームボディ™	26
	● やわらかシリーズ	28
	● エステーム™ シリーズ	31
	● アクティブライブ® シリーズ	35
	二品系ストーマ装具	37
	● ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ	38
	● ナチュラ™ シリーズ	40
	● エステーム シナジー® シリーズ	47
小児用ストーマ装具		49
ストーマ装具併用品		51
ストーマ用洗腸用具		62
製品の使用方法	単品系ストーマ装具	65
	ストーマ袋の閉鎖具	66
	二品系ストーマ装具	71
	ストーマ装具併用品	73
索引		75



convatec

— よりそい、つなぐ —

私たちの生活は、さまざまな人のつながりの中で地域や社会が形成され、異なる世代を通じて移り変わってゆきます。

オストメイトを取り巻く環境も、多様化する人と社会のつながりの中で、より良いストーマケアが求められ変化してきました。

私たちコンバテックは、そのように多様化する環境の中で、オストメイト、そしてストーマケアに従事するすべての人によりそい、誰もが簡単に扱えて、漏れのない安心な生活を過ごしていただきたいという思いを持ち続け、「誰でもシンプルに漏れないケアを実現できる」ストーマケア製品の提供を目指してきました。

同時に、日本国内では40年以上にわたり皆さまと共に歩ませていただいた中で、私たちはオストメイトを中心とした医療、地域社会、生活、そして人を「つなぐ」役割でありたいとも思うようになりました。それは、つながりで得られる力がオストメイトにとって充実した毎日を創ると考えるからです。

コンバテックは、そのつながりの中で得ることのできる最良のストーマケアを目指していく企業として「つなぐシンプルケア」を新しく提言させていただきます。

“医療と地域社会をつなぐ
地域社会と生活をつなぐ
生活と人をつなぐ”

つなぐシンプルケア

Our History

コンバテックの歴史

コンバテックは、世界で初めて皮膚保護性を有する粘着剤を開発し、現在の皮膚保護剤のスタンダードであるポリマーブレンド系皮膚保護剤のはじまりとなった「バリケア®」として製品化するなど、ストーマ装具の技術的基盤を築き、ストーマ造設後の皆さまの生活の質(QOL)向上に貢献して参りました。「バリケア®」をはじめとするコンバテックの皮膚保護剤と、モルダブルテクノロジー™などの先駆的技術は、世界中の医療従事者より高い評価と信頼をいただき、多くのストーマ造設後の皆さまにご使用いただいております。

1960-	スクイブ・コーポレーションが開発した歯科用粘着材をストーマケア製品として製品化。画期的な製品として高い支持を得る。
1978	日本における、スクイブ・コーポレーションの独立部門としてコンバテック事業部設立。「バリケア® ウェハー」と世界初の二品系ストーマ装具バリケア® システム2を発売。
1999	「バリケア® ナチュラ™」発売
2000	「バリケア® オートロック」発売
2004	コンバテック モルダブルテクノロジー™製品発売
2010	新設計ストーマ袋(エスティーム™/エスティーム シナジー®)発売
2012	新設計ストーマ袋(ナチュラ™ プラス)発売 「エスティーム™ CVX」発売 「ニルタック™」、「シレッゼ™」発売
2013	「エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期」発売
2014	「コンバテック シール」発売 「エスティーム™ モルダブル」発売
2016	「エスティーム™ やわらか凸」発売
2017	「やわらか凸 イレオ」、「やわらか平面 イレオ」発売 二品系浮動型フランジ「ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ」発売
2018	パナソニックの独自技術で生まれた「ニオフ消臭潤滑剤」発売 パナソニックの独自技術で生まれた「ニオフ消臭スプレー」発売
2019	「エスティーム™ やわらか凸 シャロー」発売 「エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ」発売
2021	「やわらか凸 シャロー イレオ」発売 デジタルサービス開始
2022	エセンタ™ シリーズ発売 「ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用」発売
2024	「エスティーム ボディ™」発売

※既に販売終了している製品を含む

NEW

エステームボディ™

EsteemBody™

あらゆるBodyによりそい、密着



一人ひとり異なる体型とストーマタイプに対応するように長年の実績がある皮膚保護剤と積み重ねられたエビデンスを基に設計された新しい軟性凸面型の単品系ストーマ装具
エステームボディ™。

「漏れのない生活を送りたい。」

リーク ディフェンス™を備えた
エステームボディ™は
ストーマ保有者の方への快適さと
漏れの防止に関するニーズに応えます。



エステームボディ™

EsteemBody™

リークディフェンス™の特長

1

さまざまな体型に合う凸面型装具

一人ひとり異なる体型やストーマタイプに幅広くご使用いただけるような単品系軟性凸面型を取り揃えました。



2

長年の実績がある皮膚保護剤

コンバテックの皮膚保護剤は、ハイドロコロイドの先駆です。ストーマ保有者の方が初めて貼付する時も、慣れてからも、いつも安心して使用できるように開発されました。

3

洗練された装具のデザイン

膨らみを最小限に抑え、透けにくい防水性の高い素材のストーマ袋の設計となっています。

●製品リストはP.26、27を参照

エステームボディ™の特長



1

Convexity


さまざまな体型に合う凸面型面板

広範囲に適する軟性凸面型面板

エステームボディ™の「軟性凸面型面板」は、2つの凸面の深さから選べます。さらにそれぞれの凸面の深さに幅広いテンション位置の取り扱いがあり、広い範囲のストーマタイプに適しています。

エステームボディ™の面板

軟性凸面型（全面皮膚保護剤）

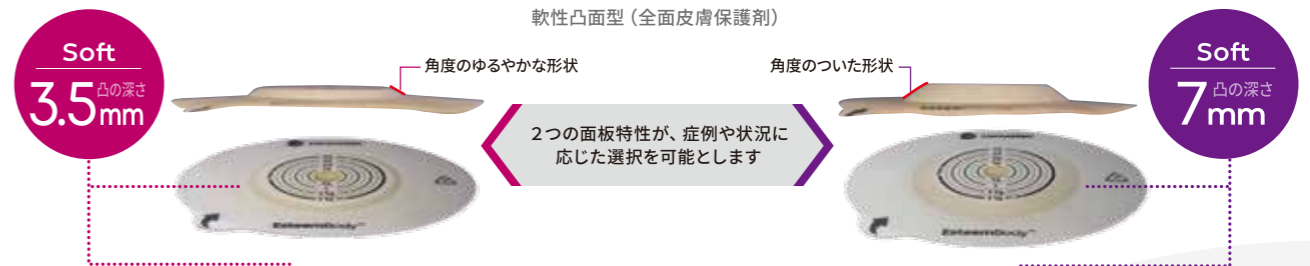

腹壁、およびストーマの条件


3.5mm	条件	7mm	
普通、または硬い腹壁	腹壁の硬さ	普通、またはやわらかい腹壁	
山型～平坦型、または軽い陥凹型	腹壁の形状	平坦型～陥凹型	
伸ばせる浅い皺や軽いたるみ	皺、皮膚のたるみ	伸ばせる皺や軽いたるみ、もしくは軽いオーバーハング	
非突出～突出	ストーマの高さ	陥凹～突出	
凸面の深さがより浅くやわらかな面板が、ストーマ周囲に追従し、浅い皺やたるみを補正		凸面の深さがより深く程よい硬さの面板が、皺やたるみを伸ばしストーマ近接部をしっかり補正	

3.5mm、7mm、それぞれの面板が実現するケアの安心感

術直後から退院・社会復帰後までのあらゆる時期に ストーマや腹壁の変化にも対応


ストーマの“突出化”

ストーマサイズに最も近いコンベックスリングサイズを選択することで、ストーマ近接部にテンションをかけることができ、ストーマの突出を図ります。この時、凸面が深い装具を選択すると、よりストーマが突出します。

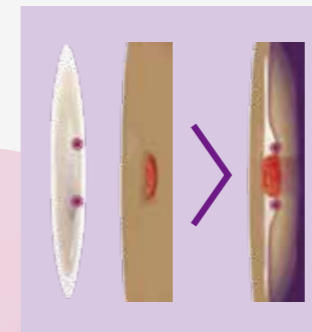

腹部の“平坦化”

ストーマサイズより大きいコンベックスリングサイズを選択することで、ストーマから離れた位置にテンションをかけることができ、腹部が平坦になります。

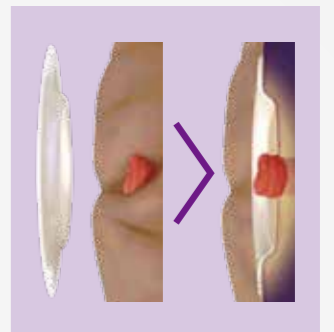

※実際には腹部の皺を伸ばした状態で装具を貼付する必要があります。

2 Skin Barrier 長年の実績があるデュラヘーシブ®皮膚保護剤

さまざまな肌に密着するデュラヘーシブ®皮膚保護剤

エステームボディ™は、デュラヘーシブ®皮膚保護剤を使用しています。デュラヘーシブ®皮膚保護剤は、ハイドロコロイドのパイオニアであり、乾いた肌にも湿った肌にも密着する肌に優しい皮膚保護剤です。ストーマ保有者の方が初めて貼付するときも、慣れてからも、いつも安心して使用できます。



排泄物が水様性の方にもお薦めの耐久性に優れたデュラヘーシブ®皮膚保護剤

デュラヘーシブ®皮膚保護剤は、湿った肌でも同じように機能し、尿路ストーマの方や水様性排泄物の方にもお薦めの優れた耐久性となっています。皮膚保護剤部分が膨潤する「タートルネック作用」により、ストーマ近接部にフィットし、より強力に密着、隙間を塞ぎます。また、エステームボディ™の皮膚保護剤は、1~6日間の長期貼付が可能、より安心なストーマケアをサポートします。



ハイドロコロイドが水分内に移動

ハイドロコロイドが水分を吸収

ハイドロコロイドと水分がひとつになる

当社の皮膚保護剤は皮膚を適切な状態に保つようにつ作られています

3 Design 洗練された装具のデザイン

さまざまなシーンを考慮した素材



撥水性のある素材を使用しており、安心して入浴や水泳をしていただけます

窓付ストーマ袋は、白い服や薄手のシャツでも目立ちにくいウォームグレー色

排泄物の色が透けにくい設計

新たなデザインコンセプトによるストーマ袋の形状



消化管用

消化管用ストーマ袋の独特な8字型形状がストーマ袋の膨らみを抑えます。



尿路用

尿路用ストーマ袋は、新たな仕切り構造でストーマ袋の膨らみを軽減します。

排出口デザイン

消化管用

消化管用 下部開放型のストーマ袋の排出口は操作しやすい設計となっています。

排出口を格納できる

排出口を折りたたむと排出口を格納でき、鼠径部にあたらずに使用できます。
窓付のストーマ袋の場合は、折りたたまれた排出口が収納ポケットに格納され、すっきりとしたデザインとなります。



操作・排出が簡単

従来よりフラップからプレートまでの距離が長くなり、プレートの縦幅も太くなったので、さらに操作しやすく指で簡単に開くことができます。また排出口の横幅は70mmと幅広設計になっています。



ウロ(尿路用)

ウロ(尿路用)はソフトタップ式を採用し水抜け機能も備えています。

柔らかいソフトタップ排出口

エステームボディ™ウロ(尿路用)の排出口には、柔らかいソフトタップ式が採用されており、足や体に当たっても違和感が少ないように設計されています。
また、ナチュラ™プラス ウロストミーパウチと同じソフトタップを採用しております。

水切りも出来るV字の切り込み付き

入浴時の際などにストーマ袋の織布の内側に水が入ってしまっても、V字の切り込みがあるため、簡単に絞り出して排水することができます。



温かみのある「ウォームグレー」

エステームボディ™は、温かみのある「ウォームグレー」色をストーマ袋に使用しています。

衣服にも透けにくく、肌との色の差が出ないように開発されただけでなく、それぞれ異なる患者様によりそい、まるで身体の一部と感じられるように設計されています。






コンバテック モルダブルテクノロジー™



クルクルと巻き広げるだけ。
ハサミ要らずのサイズ合わせ。
ストーマに簡単フィットします。

単品系、二品系いずれにも装備

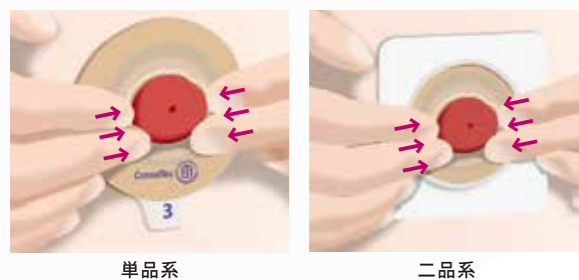

ディスクの中心に指を添え、
ストーマの形に合うように
中心から外側へ向かって
巻き広げます。

モルダブルディスクを貼付。
隙間が残らないよう、
巻き広げた皮膚保護剤を
ストーマ方向に戻します。

装具選択で重要な点は、漏れない、皮膚障害を起こさないこと

ストーマ近接部の皮膚に
面板を安定して
密着させること

ストーマ近接部へ
しっかり“フィット”し、
隙間を作らないこと

腸蠕動で変化する
ストーマサイズに、常に
柔軟に対応できること

モルダブルは日々変化するストーマサイズへ自然にフィットし、
常に隙間の無い状態を保つことができる


上記3つの必要因子に、全て対応可能なのが

コンバテックのモルダブルテクノロジー™

モルダブルテクノロジー™の特長

特長1 指で成形、ハサミは不要

皮膚保護剤を指で巻き広げて成形することで、さまざまな形状やサイズのストーマに対応可能。正確にストーマサイズを測る必要も、ハサミを使う必要もありません。

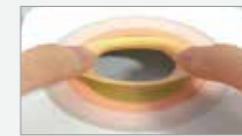

特長2 リバウンディングメモリー™

皮膚保護剤が自然に巻き戻り、日々変化するストーマにも隙間をつくりません。



特長3 タートルネック作用

水分に触れると皮膚保護剤部分が膨潤し、タートルネックのようにストーマ近接部にフィットし、より強力に隙間を塞ぎます。




※ご使用前にストーマの高さ、形状をご確認ください。特に高さは最も低い時で5mm以上は必要とします。

装着までのタイムトライアルを実施!

コンバテック モルダブル テクノロジー™面板の使いやすさを実感していただくために、医療従事者の方に使用していただき、タイムトライアルを実施しました。

手順) コンバテック モルダブル テクノロジー™面板(A)、カスタムカット面板(B)のどちらかを選択いただき、(A)は楕円型、(B)は正円型のストーマ模型にそれぞれ貼付し、タイムトライアルを実施。 ※同一性能を持った二品系装具での計測

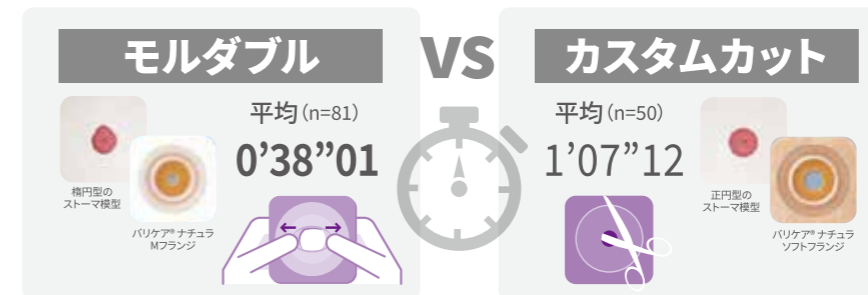

経験に左右されない装着のしやすさが証明されました。

モルダブルを使用する有用性

時間、手間の削減

排泄物の付着から皮膚を保護

ストーマサイズの変化に対応し漏れのリスク低減

モルダブルディスクの構造



モルダブルディスク (円盤状皮膚保護剤)

断面図

- 皮膚保護剤: デュラヘーシブ® 高い耐久性
- ポリエチレンフィルム 特殊加工: エンボス
- 皮膚保護剤: バリケア® 高い皮膚保護性

皮膚

ストーマの高さと形状について



ストーマの高さが最も低い時で5mm以上



ストーマの形状は円柱型またはマッシュルーム型



モルダブル テクノロジー™は単品系は平面、二品系は凸面、平面に装備されています。

- 単品系...P.31
- 二品系...P.38、P.40、P.41、P.43、P.48



ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ

リフトアップ機能で、嵌合圧をお腹にかけずに手で受ける、
浮動型面板




操作性の高いリフトアップ機能と 持ちやすいソフト・リム

- 1 透明の蛇腹(リフター)が上方に伸展することで、指の第一関節(個人差があります)まで入るスペースを確保。
- 2 フランジの直下まで指が入るためパウチとの嵌合が容易。
- 3 広く持ちやすいソフト・リムは、セルフケアできる方、ケアする方、双方が操作しやすいデザイン。

●製品リストはP.38、39を参照

アコーディオン® シリーズの特長

指が入るスペースが確保され持ち上がるので、
お腹への嵌合圧が軽減。

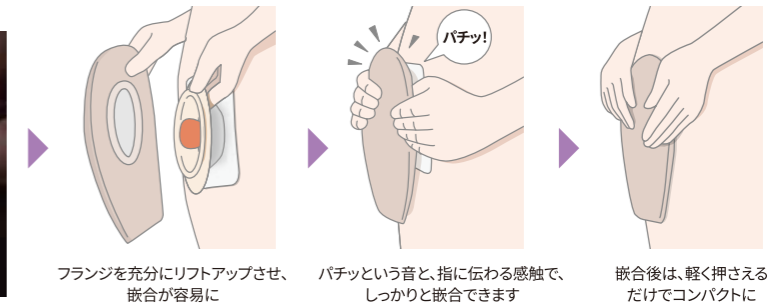

誰にでも扱い易く、装着も安心!



面板はフィット+フランジは水平 ニューフローティング

面板が腹壁の形状に合わせて屈曲してもフランジは独立して水平を保ちます。山型のお腹やヘルニアの方にも反発せずしっかりフィットします。




“パチッ”の音でしっかり装着確認 スナップロック式嵌め込み式

嵌合の際、パチッという音と感触で確認でき、誰にでも扱い易く簡単のため安心して装着できます。ライフスタイルや用途に合わせて豊富なラインアップのナチュラ™シリーズのストーマ袋を選択することができます。



グリップが効くワイドスペース ソフト・リム



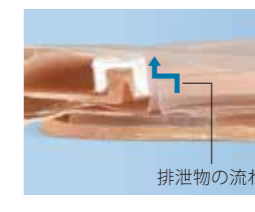


着脱の際に指を添える(つまむ)スペースが十分にあり、巧緻性の低い方、視力の弱い方でもグリップが効きます。ソフトな素材で指先に「あたり」が優しいデザインとなっています。



リフターが清潔な状態を保つ 防汚機能

リフターが防汚壁となりフランジとストーマ袋の嵌合部に排泄物が潜り込むのを防ぎます。クリーンで快適な状態を保ちます。

医療従事者の皆様に二品系装具を選択する理由を聞いてみました。



<p>ストーマを直視しながら貼付できる</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 面板を正確な位置へ貼付でき、漏れやスキントラブルの低減 ● パウダー散布など処置が簡単 	<p>高さのある浮動型は安心</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指がしっかり入るため、ストーマ袋の着脱やガス抜きが容易 ● リム(持ち手)が広く持ちやすいことは、腹圧を掛けずに交換が可能 ● 嵌合がし易い構造は、セルフケアの方、介助者の方にもやさしい 	<p>トータルコストの低減に</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 単価でなくランニングコストで比較が重要 ● 長期貼付で単品系と同等以上のケースも望め、コストを抑えた運用も可能 <div style="text-align: center;">  <p>単品系 二品系</p> </div> <p>例) 面板:バリアク® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン® ストーマ袋:ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ</p> <p>※1回の貼付に掛かる金額:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>面板 700円</td> <td>+</td> <td>ストーマ袋 372円</td> <td>=</td> <td>1,072円 (単価)</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">1ヶ月間の使用金額目安</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">7,504円</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(4日間貼付×7回/月)</p>	面板 700円	+	ストーマ袋 372円	=	1,072円 (単価)
面板 700円	+	ストーマ袋 372円	=	1,072円 (単価)			
<p>貼付期間を長くしたい場合に</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 耐久性が高い保護剤を選定する事で、装具交換の頻度と労力の低減 ● 短期交換などによる脆弱な皮膚への剥離刺激の低減 	<p>状況に合わせたストーマ袋の選択が可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 面板種類を変えずに、便性に合わせたストーマ袋へ変更が可能 ● お出掛け時はコンパクトサイズへ変更など、TPOに合わせたストーマ袋の選択 						

平面型2種&凸面の3タイプから選べます。

<p>ハサミ不要! 平面 (自在孔)</p>  <p>モルダブル テクノロジー™ 隙間なく、漏れも少ない優れた皮膚保護剤がストーマ近接部を強力に保護します。</p> <p>指で成形、ハサミは不要 ハサミ不要でストーマサイズに自由に成形できます。</p> <p>リバウンディングメモリー™ 皮膚保護剤がストーマに向かって逆戻りし、日々変化するストーマとの隙間を作りません。</p> <p>タートルネック作用 シーリング効果が高くストーマ近接部の保護能力に優れています。</p>	<p>豊富なサイズ! 平面 (自由開孔)</p>  <p>カスタムカット ストーマサイズに合わせて皮膚保護剤をカットします。13mm~45mmまでのストーマサイズに対応可能なラインアップ。45mm・57mm・70mm、3つのフランジサイズで豊富なバリエーション。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>フランジサイズ</th> <th>有効径</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45mm</td> <td>13~21mm</td> </tr> <tr> <td>57mm</td> <td>13~33mm</td> </tr> <tr> <td>70mm</td> <td>13~45mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>※モルダブルはフランジサイズ45mmはありません。</p>	フランジサイズ	有効径	45mm	13~21mm	57mm	13~33mm	70mm	13~45mm	<p>しっかり押さえる! コンベックス (硬性凸面型)</p>  <p>セキア6.65 “6.65mm”のミッドレンジの程よい高さでユニークな凸面形状がストーマを押し出し、近接部を押さえ、皺やくぼみを補正して漏れを防ぎます。</p>  <p style="text-align: right;">深さ6.65mm</p>
フランジサイズ	有効径									
45mm	13~21mm									
57mm	13~33mm									
70mm	13~45mm									

コンバテックの皮膚保護剤

コンバテックの皮膚保護剤は4種類です。目的に応じて、使い分けていただくことができます。

<p>肌に優しい</p> <p>↑</p> <p>↓</p> <p>耐久性が高い</p>	<p>バリケア® (CPGb系¹⁾ / CPB系²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 短期交換でも剥離刺激が少なく、皮膚に優しく安心です。 ● 水分を素早く吸収してゲル化するため、湿った皮膚にも粘着します。 	
	<p>やわらか皮膚保護剤 (CPGbs系¹⁾ / CPBS系²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 初期粘着が非常に優れ、素早く皮膚に密着します。 	
	<p>デュラプラス® (CPs系¹⁾ / CPS系²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 皮膚に優しく、耐久性、密着性、柔軟性にも優れています。 ● 初期粘着に優れ、腹壁にしっかりフィットします。 	
	<p>デュラヘーブ® (CPGbs系¹⁾ / CPBS系²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水様性排泄物のストーマ(イレオストミーやウロストミー)に最適です。 ● 水分を吸収して膨潤し、ストーマとの隙間を埋めて、排泄物のもぐり込みを防ぎます。 	

1) ストーマ・排泄リハビリテーション学用語集 第4版. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会編. 東京, 金原出版. 2020. p151, 164-165.
2) 吉川隆造. 最近の皮膚保護剤について組成的分類表の作成. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌. Vol.2, No.2, JUN2007.p.3-7

コンバテックの面板の構造・形状

単品系 **面板の形状**
種類: 平面型、軟性凸面型、硬性凸面型

主な製品:



エステーム™ モルダブル™
(平面型)



エステームボディ™
(軟性凸面型)



エステーム™ CVX
(硬性凸面型)

二品系 **フランジの構造**



浮動型フランジ
面板からフランジが浮き上がります。



固定型フランジ
面板にフランジが固定されています。

面板の構造



全面皮膚保護剤タイプ
全面に、皮膚保護剤を使用している肌に優しいタイプです。



外周テープ付タイプ
皮膚保護剤の外周に、テープを使用しており、腹壁に沿って密着します。

 **アクリルテープ**
耐久性に優れ、かつ通気性の高いテープです。

 **ハイドロテープ**
肌に優しいハイドロコロイドをベースにしたテープです。

面板の形状
種類: 平面型、硬性凸面型

主な製品:



ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®
(平面型)



ナチュラ™ Cフランジ
(硬性凸面型)



モルダブルシリーズ
(平面型、硬性凸面型)

コンバテックとともに安心して日常生活を送りませんか？

コンバテックme+™クラブ

入会費・
年会費無料

『コンバテックme+™クラブ』は、
ストーマ保有者と支援者の方々によりそい、
サポートする事を目的とした
会員制のクラブです。
会員の皆さまには、
専用のWEBサイト・メールを通じて、
お役立ち情報の提供や
ストーマケアに関するご相談に
ご対応いたします。
他社製品を使用されている方も
ご入会いただけます。



会員登録方法 *メールアドレスをお持ちの方は、会員登録が可能です

右記いずれかの方法で
「コンバテックme+™クラブ」へ
アクセス

スマートフォンで
右記QRコードを
読み込む



「コンバテッククラブ」で検索

下記URLを入力
<https://bit.ly/3uJ6jg3>

「会員登録」を押す

「今すぐ新規会員登録」を押す

「メールアドレスを入力し、「確認コードを送信」を押す
「msonlineserviceteam@microsoftonline.com」からのメールを受信できるようにしてください。

メールで届いた6桁のコードを入力し、「コードの確認」を押す

必要事項(プロフィール)を入力して登録完了

ご登録いただきました「ストーマ保有者・ご家族/知人」の方に、
入会特典としてトラベルポーチと冊子を差し上げます。

*ストーマ保有者1人に1つになります。*デザインが変更になることがあります。
写真は例です。器具やアクセサリ製品は含まれません。

サイズ横21cm×縦18cm×厚み3cm



サービス内容

お悩み相談

ストーマ装具やストーマケア、生活のこと、どこに相談したらいいのかわからないなど、
ストーマに関するお困りごとをご相談ください。コンバテックme+™クラブの皮膚・排泄
ケア認定看護師が、状況をお聞きした上で、解決に向けてお手伝いをいたします。



こんなお悩みや質問・疑問のご相談にお応えします。

ストーマ装具の使い方が
わからない…

ストーマケアやストーマ周囲の
お手入れ方法

排泄物の漏れについて

趣味や旅行、ニオイ対策や
入浴など日常生活について

ストーマケア製品の購入先を紹介して
欲しい。違う製品も試してみたい

社会福祉制度について
詳しく知りたい



ご相談は電話、メール、テレビ電話の3通り

コンバテックme+™クラブ通信

ストーマケアに関するメールマガジン

毎月1日・15日に配信

ストーマケアや製品、生活などの
お役立ち情報を配信



知恵袋

よくある質問と回答を紹介

皆様からよくいただくストーマケアに関する質問と
回答の紹介や、会員様の体験談。



生活

ストーマケア

製品

動画

動画だからわかりやすい!

安心して快適な生活を送っていただくため、
情報を動画でご紹介。



【例】ストーマ保有者のための
エクササイズ

【例】製品の使い方

お得な情報をスマートフォンで手軽にチェック！

公式SNS情報発信サービス

Instagram、フェイスブック、LINEのSNSチャンネルにおいて最新イベント情報やキャンペーン情報を配信しております。スマートフォンやタブレット端末からでもお気軽にアクセスしてみてください。



ストーマ保有者のための最新イベント情報やキャンペーン情報を配信しており、ストーマケアに役立つ知識なども配信しております。ぜひフォローいただき、お役立ち情報をチェックください！



Instagram



convatec_japan



フェイスブック




コンバテック



LINE






@ctec_me

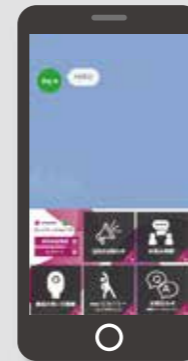

1 ストーマの高さ **2** 腹壁の硬さ

2本の指で垂直にストーマ周囲4cm以内の腹壁を押し、沈み込みを見る

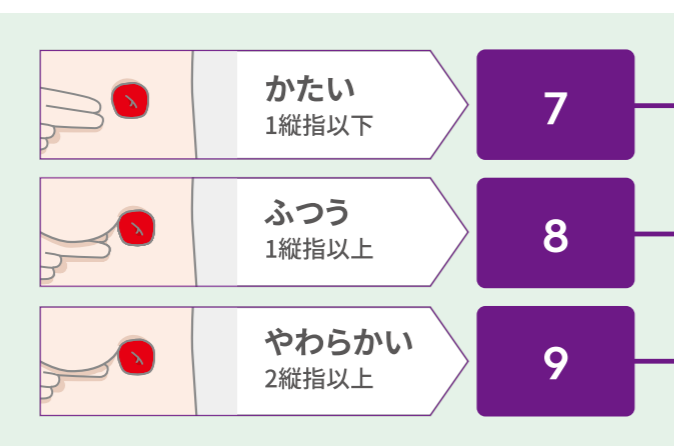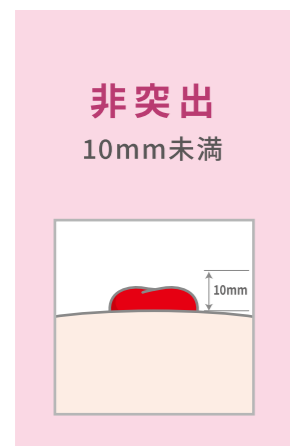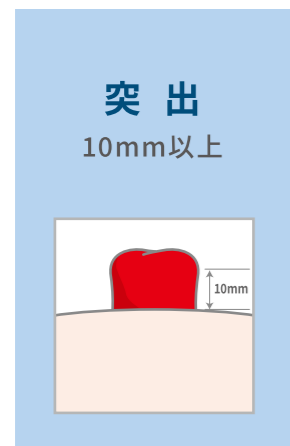

対象装具



単品系装具		二品系用面板 ※別途ストーマ袋が必要です。	
消化管用	尿路用	固定型	浮動型
軟性凸面型 P.26、28、29 平面型 P.31、32、35	軟性凸面型 P.27、30 平面型 P.34、36	平面型 P.40、41、42	平面型 P.38
軟性凸面型 P.26、28、29 硬性凸面型 P.33	軟性凸面型 P.27、30 硬性凸面型 P.36	平面型 P.40、41、42 硬性凸面型 P.43	硬性凸面型 P.39
軟性凸面型 P.26、28、29 平面型 P.32	軟性凸面型 P.27、30 平面型 P.34、36	平面型 P.41、42	平面型 P.38
軟性凸面型 P.26、28、29 硬性凸面型 P.33、35	軟性凸面型 P.27、30 硬性凸面型 P.36	硬性凸面型 P.43	硬性凸面型 P.39
軟性凸面型 P.26、28、29	軟性凸面型 P.27、30		硬性凸面型 P.39
硬性凸面型 P.33、35	硬性凸面型 P.36	硬性凸面型 P.43	

One Piece

単品系ストーマ装具

面板とストーマ袋が一体となった単品系ストーマ装具

- エスティームボディ™
さまざまな体型やストーマによりそい、密着して漏れから守ります
- やわらかシリーズ
やわらかさは「快適」のために、コシは「安心」のために
- エスティーム™ シリーズ
さまざまなストーマに対応
- アクティブライフ® シリーズ
シンプルで簡単なロングセラー



単品系ストーマ装具

日頃のストーマケア もっとシンプルに

装具の着脱操作がシンプルな単品系ストーマ装具。
コンバテックの単品系装具に、リーク ディフェンス™という
新しいコンセプトのもと開発された
軟性凸面型の単品系ストーマ装具「エスティームボディ™」が仲間入り。
より漏れのない安心・安全な生活をサポートします。

エステームボディ™

消化管用下部開放型

軟性凸面型(全面皮膚保護剤)

エステームボディ™(消化管用)



※排出口を閉じた状態



- 広い範囲のストーマタイプに適する単品系軟性凸面型装具。
- 初めて貼付するときも、慣れてからも、いつも安心して使用できます。
- 膨らみを抑え、透けにくく防水性の高い素材のストーマ袋。
- 皮膚保護剤には耐久性に優れたデュラヘーシブ®を採用しています。

凸の深さ 3.5mm

カスタムカット



注文番号	初孔サイズ	ストーマサイズ	コンベックスリングサイズ	入数	本体価格*
423654	10mm	25mmまで	30mm	10枚	8,490円
423653	10mm	35mmまで	40mm		
423652	10mm	45mmまで	50mm		
423651	10mm	55mmまで	60mm		
	透明				

※非課税

プレカット



注文番号	既製孔サイズ	有効径	コンベックスリングサイズ	入数	本体価格*
423646	25mm	35mmまで	40mm	10枚	8,490円
423647	30mm	35mmまで	40mm		
423648	35mm	35mmまで	40mm		
	窓付				

※非課税



凸の深さ 7mm

カスタムカット



注文番号	初孔サイズ	ストーマサイズ	コンベックスリングサイズ	入数	本体価格*
423667	10mm	25mmまで	30mm	10枚	9,490円
423666	10mm	35mmまで	40mm		
423665	10mm	45mmまで	50mm		
423664	10mm	55mmまで	60mm		
	透明				


※非課税

プレカット



注文番号	既製孔サイズ	有効径	コンベックスリングサイズ	入数	本体価格*
423659	25mm	35mmまで	40mm	10枚	9,490円
423660	30mm	35mmまで	40mm		
423661	35mm	35mmまで	40mm		
	窓付				

※非課税

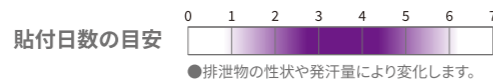

尿路用

軟性凸面型(全面皮膚保護剤)

エステームボディ™ウロ(尿路用)



- 広い範囲のストーマタイプに適する単品系軟性凸面型装具。
- 初めて貼付するときも、慣れてからも、いつも安心して使用できます。
- 膨らみを抑え、透けにくく防水性の高い素材のストーマ袋。
- 皮膚保護剤には耐久性に優れたデュラヘーシブ®を採用しています。

凸の深さ 3.5mm

カスタムカット(アダプター2個付)



注文番号	初孔サイズ	ストーマサイズ	コンベックスリングサイズ	入数	本体価格*
423714	10mm	25mmまで	30mm	10枚	10,790円
423713	10mm	35mmまで	40mm		
423712	10mm	45mmまで	50mm		
	透明				


※非課税

プレカット(アダプター2個付)



注文番号	既製孔サイズ	有効径	コンベックスリングサイズ	入数	本体価格*
423706	15mm	25mmまで	30mm	10枚	10,790円
423707	20mm	25mmまで	30mm		
423708	25mm	25mmまで	30mm		
423709	30mm	35mmまで	40mm		
423710	35mm	35mmまで	40mm		
	窓付				

※非課税

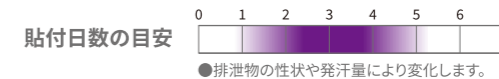


凸の深さ 7mm

カスタムカット(アダプター2個付)



注文番号	初孔サイズ	ストーマサイズ	コンベックスリングサイズ	入数	本体価格*
423727	10mm	25mmまで	30mm	10枚	10,990円
423726	10mm	35mmまで	40mm		
423725	10mm	45mmまで	50mm		
	透明				

※非課税

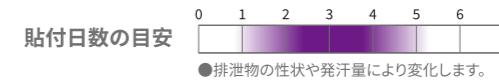

やわらかシリーズ

消化管下部開放型

軟性凸面型(全面皮膚保護剤)

エスティム™ やわらか凸 シャロー(消化管用)



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 4mmの薄さ、そして圧をかけすぎないゆるやかな角度
- 折りまげることも可能な面板は、ストーマ直視下での容易な貼付が可能
- 軽く押さえの効く、しなやかな面板は、着け心地よく、さまざまな腹壁に密着・追従
- スリット入

カスタムカット(クリップ*1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
422365		10mm	28mmまで	S		
422364	肌色*1	15mm	40mmまで	M	10枚	8,480円
422363		20mm	47mmまで	L		

プレカット(クリップ*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
422545		25mm	40mmまで	M		
422546		30mm	40mmまで	M		
422547	肌色*1	35mm	40mmまで	M	10枚	8,480円
422542		40mm	47mmまで	L		
422543		45mm	47mmまで	L		

貼付日数の目安 *1:スリット(観察窓)付き *2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

エスティム™ やわらか凸(消化管用)



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいのにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型嵌め込み具がストーマ近接部を押さえます
- スリット入

カスタムカット(クリップ*1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421619		20mm	30mmまで	M		
421615	肌色*1	20mm	40mmまで	L	10枚	9,010円
422159		20mm	55mmまで	XL		

プレカット(クリップ*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421621		30mm	30mmまで	M		
421617	肌色*1	30mm	40mmまで	L	10枚	9,010円
421618		35mm	40mmまで	L		

貼付日数の目安 *1:スリット(観察窓)付き *2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

キャップ式イレオストミー用

軟性凸面型(全面皮膚保護剤)

やわらか凸 シャロー イレオ



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 4mmの薄さ、そして圧をかけすぎないゆるやかな角度
- 折りまげることも可能な面板は、ストーマ直視下での容易な貼付が可能
- 軽く押さえの効く、しなやかな面板は、着け心地よく、さまざまな腹壁に密着・追従
- スリット入

カスタムカット(クリップ*1個付)


注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
423513		10mm	28mmまで	S		
423512	肌色*1	15mm	40mmまで	M	10枚	8,270円
423511		20mm	47mmまで	L		

プレカット(クリップ*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
423516		25mm	40mmまで	M		
423517		30mm	40mmまで	M		
423518	肌色*1	35mm	40mmまで	M	10枚	8,270円
423514		40mm	47mmまで	L		
423515		45mm	47mmまで	L		

貼付日数の目安 *1:スリット(観察窓)付き *2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

やわらか凸 イレオ

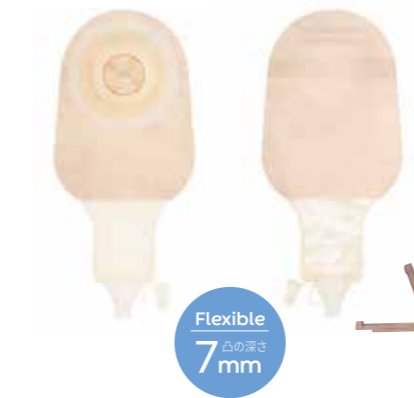

- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいのにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型嵌め込み具がストーマ近接部を押さえます
- スリット入

カスタムカット(クリップ*1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421937		15mm	20mmまで	S		
421936	肌色*1	15mm	30mmまで	M	10枚	8,270円
421935		15mm	40mmまで	L		

貼付日数の目安 *1:スリット(観察窓)付き *2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

平面型(全面皮膚保護剤)

やわらか平面 イレオ



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 60mmまでのストーマに対応し、術直後から使用できます
- スリット入

カスタムカット(クリップ*1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421934	肌色*1	20mm	60mmまで	10枚	7,420円

貼付日数の目安 *1:スリット(観察窓)付き *2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

エステーム™ シリーズ

さらなる安心感とライフスタイルに合わせた快適性。

エステーム™とは“尊重・尊厳”を意味します。ストーマ所有者の意見を尊重したストーマ袋で、ストーマ所有者の皆さまの尊厳を保つため、さらなる安心感と快適性をお届けします。消化管ストーマの方の短期交換から中長期交換が可能なタイプまで、ニーズに合わせてお選びいただけます。



消化管用下部開放型 平面型 (全面皮膚保護剤)

エステーム™ モルダブル




- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 付属のモルダブルディスクが巻き戻り、ストーマ近接部を強力に保護
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 肌色タイプはストーマが見えるスリット入

モルダブル

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
413515		M	21~30mm	10枚	5,830円
413516	透明	L	31~40mm		
413517		XL	41~50mm		
413521		M	21~30mm	10枚	5,830円
413522	肌色	L	31~40mm		
413523		XL	41~50mm		

モルダブル

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
413518		M	21~30mm	10枚	5,730円
413519	透明	L	31~40mm		

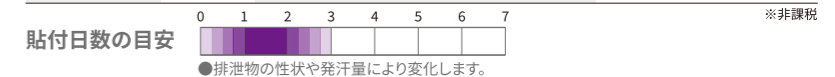

コンバテックのモルダブルテクノロジー™ 超高齢社会に向けたストーマケアのために

臨床研究によって証明された確かな皮膚保護効果。自然な巻き戻りで、ストーマ近接部の優しい保護を可能にする「モルダブルテクノロジー™」。これからの超高齢社会に向けて、より快適なストーマケアで、充実の日常生活をサポートします。

尿路用

軟性凸面型 (全面皮膚保護剤)

エステーム™ やわらか凸 シャロー ウロ (尿路用)



Soft
凸の深さ
4mm


- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 4mmの薄さ、そして圧をかけすぎないゆるやかな角度
- 折りまげること可能な面板は、ストーマ直視下での容易な貼付が可能
- 軽く押さえの効く、しなやかな面板は、着け心地よく、さまざまな腹壁に密着・追従
- 逆流防止弁付、スリット入

カスタムカット (アダプター*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
422551	肌色*1	20mm	47mmまで	L	10枚	10,070円

プレカット (アダプター*2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
422563		15mm	28mmまで	S	10枚	10,070円
422564		20mm	28mmまで	S		
422565	肌色*1	25mm	28mmまで	S		
422560		30mm	40mmまで	M		
422561		35mm	40mmまで	M		

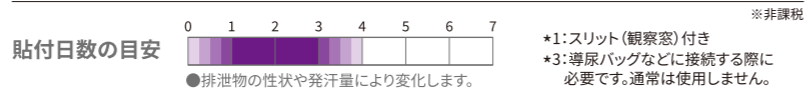

エステーム™ やわらか凸 ウロ (尿路用)



Flexible
凸の深さ
7mm


- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいのにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型嵌め込み具がストーマ近接部を押さええます
- 逆流防止弁付、スリット入

カスタムカット (アダプター*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421628		10mm	18mmまで	S	10枚	10,600円
421626	肌色*1	10mm	30mmまで	M		
421623		10mm	40mmまで	L		

プレカット (アダプター*2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421625	肌色*1	20mm	40mmまで	L	10枚	10,600円

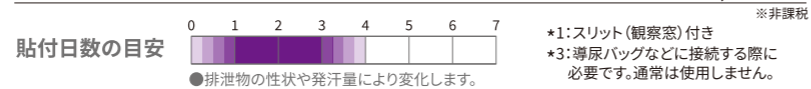

消化管下部開放型

平面型 (全面皮膚保護剤)

エスティム™ インビジクロース® ドレインパウチ




- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用の薄型面板
- 術直後からの使用が可能
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能

カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416718	透明	20mm	70mmまで	10枚	4,190円
416719	肌色	20mm	70mmまで	10枚	4,190円

プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416724	透明	25mm	25mmまで	10枚	4,190円
416728		30mm	25~30mm		
416732		35mm	30~35mm		
416736	肌色	40mm	35~40mm	10枚	4,190円
416725		25mm	25mmまで		
416729		30mm	25~30mm		
416733		35mm	30~35mm		
416737		40mm	35~40mm		

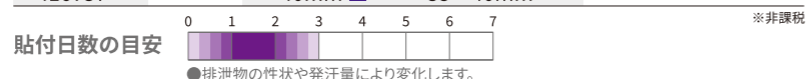

平面型 (外周テープ付)

エスティム™ インビジクロース® ドレインパウチ 中長期




- 皮膚保護剤には追従性、耐久性に優れた「デュラプラス®」を使用
- 皮膚粘着面が広い安心タイプのカスタムカットと、一回り小さな面板で使い勝手の良いタイプのプレカットのラインアップをご用意
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能

カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416976	透明	19mm	64mmまで	10枚	6,090円
416975	肌色	19mm	64mmまで	10枚	6,090円

プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421020	透明	25mm	25mmまで	10枚	6,090円
421021		28mm	25~28mm		
421022		32mm	28~32mm		
421023		35mm	32~35mm		
421024		38mm	35~38mm		
421025	肌色	25mm	25mmまで	10枚	6,090円
421026		28mm	25~28mm		
421027		32mm	28~32mm		
421028		35mm	32~35mm		
421029		38mm	35~38mm		

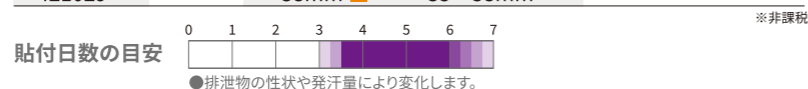

消化管下部開放型

平面型 (全面皮膚保護剤)

エスティム™ ドレインパウチ




- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- クリップタイプ

カスタムカット (クリップ2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416717	肌色	20mm	70mmまで	10枚	3,250円

プレカット (クリップ2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416723	肌色	25mm	25mmまで	10枚	3,250円
416727		30mm	25~30mm		
416735		40mm	35~40mm		

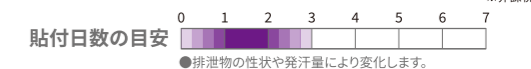

硬性凸面型 (外周テープ付)

エスティム™ インビジクロース® ドレインパウチ CVX



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- ならかな凸面が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能

プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416738	透明	19mm	19mmまで	10枚	10,070円
416740		22mm	19~22mm		
416742		25mm	22~25mm		
416744		28mm	25~28mm		
416746		32mm	28~32mm		
416748	肌色	35mm	32~35mm	10枚	10,070円
416750		38mm	35~38mm		
416739		19mm	19mmまで		
416741		22mm	19~22mm		
416743		25mm	22~25mm		
416745	肌色	28mm	25~28mm	10枚	10,070円
416747		32mm	28~32mm		
416749		35mm	32~35mm		
416751	38mm	35~38mm	10枚	10,070円	



消化管用下部閉鎖型

平面型(全面皮膚保護剤)

エスティム™ クローズパウチ




- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 下部閉鎖型ストーマ袋

カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416700	透明	20mm	70mmまで	30枚	8,500円
416701	肌色				

プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416703		25mm	25mmまで		
416706	透明	30mm	25~30mm	30枚	8,500円
416712		40mm	35~40mm		
416704		25mm	25mmまで		
416707	肌色	30mm	25~30mm	30枚	8,500円
416713		40mm	35~40mm		

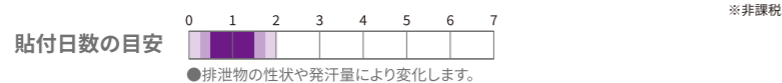


エスティム™ クローズパウチ(コンパクト)



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 入浴やスポーツ時に便利なミニサイズの下部閉鎖型ストーマ袋
- スリット入

カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421816	肌色	20mm	70mmまで	30枚	8,500円

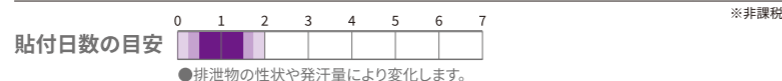

尿路用

平面型(外周テープ付)


エスティム™ ウロ 長期(尿路用)



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 平面装具でありながら、ベルトタブを装備
- 排出口の開閉状態が目視でわかる赤い開閉目印付き回転タップ式排出口
- 逆流防止弁付

カスタムカット(アダプター*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421631	透明	13mm	45mmまで	10枚	8,480円

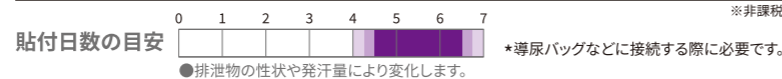

単品系ストーマ装具

アクティブライフ® シリーズ

消化管用下部開放型

平面型(全面皮膚保護剤)


アクティブライフ® ドレインパウチ ST-2



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用
- 術直後からの使用が可能
- クリップタイプ

カスタムカット(ワイヤークリップ10本、クリップ2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00200	透明	19mm	64mmまで	30枚	8,500円

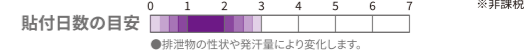

平面型(外周テープ付)


アクティブライフ® ドレインパウチ DX



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- クリップタイプ

カスタムカット(クリップ1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
ADD6410	透明	19mm	64mmまで	10枚	4,530円

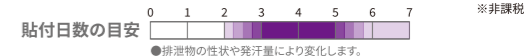

硬性凸面型(外周テープ付)

アクティブライフ® ドレインパウチ CD




- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- なだらかな凸が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- クリップタイプ



プレカット(クリップ1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
ADC1905		19mm	19mmまで		
ADC2205		22mm	19~22mm		
ADC2505		25mm	22~25mm		
ADC2805		28mm	25~28mm		
ADC3205	透明	32mm	28~32mm	5枚	5,100円
ADC3505		35mm	32~35mm		
ADC3805		38mm	35~38mm		
ADC4505		45mm	38~45mm		
ADC5005		50mm	45~50mm		

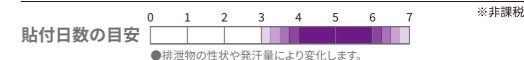

消化管術直後用装具

平面型(全面皮膚保護剤)


アクティブライフ® 術後用パウチ S



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用
- 術直後のストーマケアが容易な幅広のオープンエンドストーマ袋

カスタムカット(輪ゴム10本付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
APS7010	透明	19mm	70mmまで	10枚	3,400円

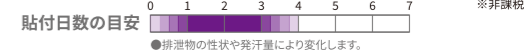

尿路用

平面型(外周テープ付)


アクティブライフ® ウロストミーパウチ(尿路用)



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 尿の排出が簡単な回転式タップを採用
- 回転式タップの赤い印で開閉状態を確認可能
- 逆流防止弁付

プレカット
(アダプター*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00925		19mm	19mmまで	10枚	10,770円
00926		22mm	22mmまで		
00927	透明	25mm	25mmまで		
00928		28mm	28mmまで		
00929		32mm	32mmまで		

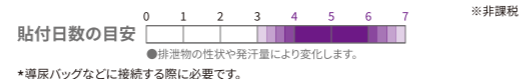

平面型(全面皮膚保護剤)


アクティブライフ® ユリナパウチ(尿路用)



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用
- かさばらないパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付

カスタムカット
(アダプター*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
AUP4510	透明	19mm	45mmまで	10枚	9,630円

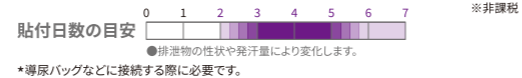

硬性凸面型(外周テープ付)

アクティブライフ® ユリナパウチ CD(尿路用)




- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- かさばらないパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付

Hard
凸の深さ
8mm

プレカット
(アダプター*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
AUC1305		13mm	13mmまで	5枚	5,670円
AUC1605		16mm	13~16mm		
AUC1905		19mm	16~19mm		
AUC2205	透明	22mm	19~22mm		
AUC2505		25mm	22~25mm		
AUC2805		28mm	25~28mm		
AUC3205		32mm	28~32mm		
AUC3505		35mm	32~35mm		

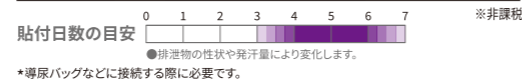

Two Piece

二品系ストーマ装具

面板とストーマ袋を組み合わせる二品系ストーマ装具は、目的に合わせて面板を装着したままストーマ袋のみを交換できます。

- ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ
嵌合圧を、おなかにかけて手で受けるフランジ
- ナチュラ™ シリーズ
豊富な製品ラインアップでさまざまなストーマに対応
- エスティム シナジー® シリーズ
単品系ストーマ装具のような軽くしなやかな装着感

ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ

嵌め込み式 浮動型 面板

平面型 (外周テープ付)

バリケア® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ



モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421030	57mmAS	13~22mm	5枚	3,500円
421031	57mmAM	22~33mm		
421032	70mmAL	33~45mm		

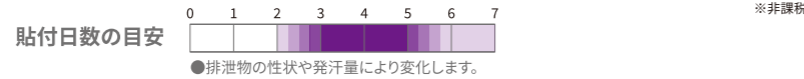

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ



モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421036	57mmAS	13~22mm	5枚	5,000円
421037	57mmAM	22~33mm		
421038	70mmAL	33~45mm		

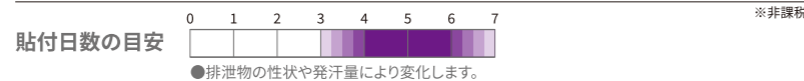

バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ




カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421455	45mm	13~21mm	5枚	3,500円
421459	57mm	13~33mm		
421463	70mm	13~45mm		

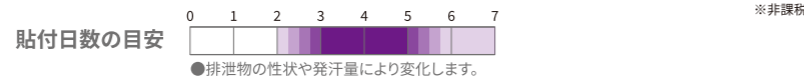

デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®

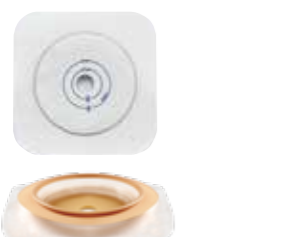


- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421453	45mm	13~21mm	5枚	5,000円
421457	57mm	13~33mm		
421461	70mm	13~45mm		

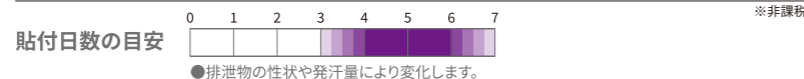

嵌め込み式 浮動型 面板

硬性凸面型 (外周テープ付)

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ アコーディオン®




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ユニークで新しい凸面形状「セキユア6.65」
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421633	45mm	13~22mm	5枚	6,000円
421635	57mm	13~35mm		
421637	70mm	13~48mm		

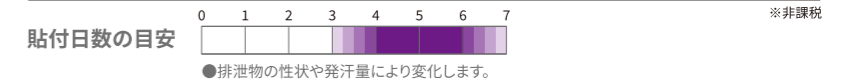

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジ アコーディオン®




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ユニークで新しい凸面形状「セキユア6.65」
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421632	45mm	13~22mm	5枚	6,000円
421634	57mm	13~35mm		
421636	70mm	13~48mm		

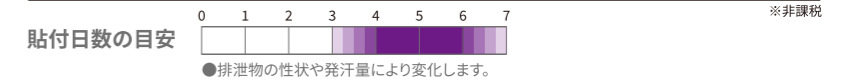

ナチュラ™ シリーズ

音と感触で嵌合を確認できるため、いつでも安心。

プラスチックリングを嵌合するスナップロック式を採用。

嵌合の際、パチッという音と感触で確認ができ、扱いやすく手順も簡単のため、安心して装着できます。

豊富なラインナップの中から、ライフスタイルに合わせて製品をお選びいただけます。

嵌め込み式 固定型 面板

平面型 (外周テープ付)

バリケア® ナチュラ™ Mフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00295	45mm	S	13~22mm	5枚	4,700円
00296	45mm	M	22~33mm		
00297	57mm	L	33~45mm		
00298	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 *XL (00298) の初孔の形は楕円です。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

バリケア® ナチュラ™ ソフトMフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
413421	45mm	S	13~22mm	10枚	9,400円
413422	45mm	M	22~33mm		
413423	57mm	L	33~45mm		
413424	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 *XL (413424) の初孔の形は楕円です。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00305	45mm	S	13~22mm	5枚	6,230円
00306	45mm	M	22~33mm		
00307	57mm	L	33~45mm		
00308	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 *XL (00308) の初孔の形は楕円です。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

嵌め込み式 固定型 面板

デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
413417	45mm	S	13~22mm	10枚	12,470円
413418	45mm	M	22~33mm		
413419	57mm	L	33~45mm		
413420	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 *XL (413420) の初孔の形は楕円です。
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

バリケア® ナチュラ™ ハイドロフランジ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00246	38mm	17~23mm	5枚	4,700円
00247	45mm	23~30mm		
00248	57mm	30~42mm		
00249	70mm	42~55mm		

貼付日数の目安 *非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ
- 豊富なプレカットラインナップをご用意

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00261	38mm	17~23mm	5枚	4,470円
00262	45mm	23~30mm		
00263	57mm	30~42mm		

貼付日数の目安 *非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00320	45mm	16mm	16mmまで	10枚	8,950円
00321	45mm	19mm	16~19mm		
00322	45mm	22mm	19~22mm		
00323	45mm	25mm	22~25mm		
00324	45mm	28mm	25~28mm		
00325	45mm	32mm	28~32mm		
00326	45mm	35mm	32~35mm		

貼付日数の目安 *非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

嵌め込み式 固定型 面板

硬性凸面型 (外周テープ付)


デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 凸面構造で、5mm以上のストーマの高さがある方に最適
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00264	45mm	S	13~22mm	10枚	14,510円
00265	45mm	M	22~33mm		
00266	57mm	L	33~45mm		

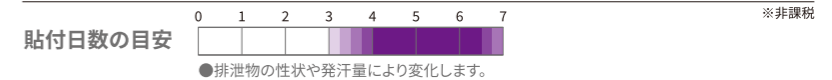


デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ



- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- なだらかな凸が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00281	45mm	13mm	13mmまで	5枚	7,250円
00282	45mm	16mm	13~16mm		
00283	45mm	19mm	16~19mm		
00284	45mm	22mm	19~22mm		
00285	45mm	25mm	22~25mm		
00286	45mm	28mm	25~28mm		
00287	45mm	32mm	28~32mm		
00288	45mm	35mm	32~35mm		

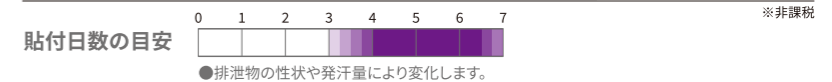

嵌め込み式 固定型 面板

平面型 (外周テープ付)


デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00277	38mm	23mmまで	5枚	5,950円
00278	45mm	23~30mm		
00279	57mm	30~42mm		

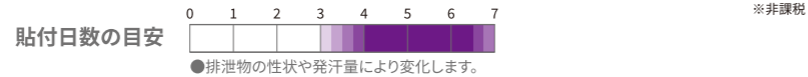

平面型 (全面皮膚保護剤)


バリケア® ナチュラ™ フランジ



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00251	38mm	17~23mm	5枚	4,470円
00252	45mm	23~30mm		
00253	57mm	30~42mm		
00254	70mm	42~55mm	5枚	6,800円
00255	100mm	55~85mm	5枚	7,930円

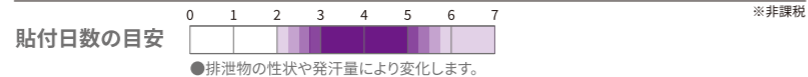


デュラヘーシブ® ナチュラ™ フランジ



- 面板全面に耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00271	38mm	23mmまで	5枚	5,950円
00272	45mm	23~30mm		
00273	57mm	30~42mm		

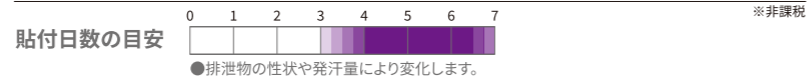

バリケア® ナチュラ™ コンベックスインサート (凸型嵌め込み具)



- バリケア® ナチュラ™の凸型対応マークのある面板に挿入して使用
- 陥没・平坦なストーマの方に

注文番号	対応フランジサイズ	規格 (内径)	ストーマサイズ	入数	本体価格 (税別)
00391	38mm	S (19mm)	13mm以下	5枚	1,243円
00392	38mm	M (22mm)	13~16mm		
00393	38mm	L (25mm)	16~19mm		
00394	45mm	S (29mm)	19~22mm		
00395	45mm	M (32mm)	22~25mm		
00396	45mm	L (35mm)	25~29mm		
00397	57mm	S (38mm)	29~32mm		
00398	57mm	M (41mm)	32~35mm		

*選択にあたっては、医療従事者にご相談ください。

嵌め込み式 消化管用 ストーマ袋

消化管下部開放型

ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ



- 巻き上げ式のマジックテープで排出口をしっかり閉鎖
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 処理のしやすい幅広タイプの排出口



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
416414	透明	38mm	10枚	3,720円
416416		45mm		
416419		57mm		
416422		70mm		
416415	肌色	38mm	10枚	3,720円
416417		45mm		
416420		57mm		
416423		70mm		

※非課税



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
416418	透明	45mm	10枚	3,220円
416421		57mm		
416424		70mm		
416472		100mm		

※非課税

バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ



- クラシックタイプの下部開放型ストーマ袋
- クリップタイプ



10枚、クリップ2個

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00311	透明	38mm	10枚	3,110円
00312		45mm		
00314		57mm		
00290	肌色	38mm	10枚	3,110円
00291		45mm		
00293		57mm		
00315	透明	70mm	10枚	3,400円
00316	透明	100mm	10枚	4,420円

※非課税



30枚、クリップ2個

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00313	透明	45mm	30枚	8,840円
00292	肌色			

※非課税

嵌め込み式 消化管用 ストーマ袋

キャップ式イレオストミー用

バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ



- イレオストミーや瘻孔のケアに
- 排泄物の性状によりクリップを使った管理も可能
- 逆流防止弁付



クリップ/アダプター*各1個、フィルター5個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
420695	透明	45mm	5枚	3,110円
420696		57mm		
420697		70mm		
00332	肌色	45mm	5枚	3,110円
00333		57mm		
00334		70mm		

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。

※非課税

消化管下部閉鎖型

ナチュラ™ プラス クローズパウチ



- 下部閉鎖型ストーマ袋
- スリット入



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
421680	肌色	45mm	30枚	7,450円
421682		57mm		

※非課税



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
421681	肌色	45mm	30枚	6,800円
421683		57mm		

※非課税

ナチュラ™ プラス クローズパウチ コンパクト



- 入浴やスポーツ時に便利なミニサイズの下部閉鎖型ストーマ袋
- スリット入



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
421796	肌色	45mm	30枚	7,450円
421797		57mm		

※非課税

嵌め込み式 尿路用 ストーマ袋

ナチュラ™ プラス ウロストミーパウチ



- 独自の仕切構造「Vセパレート機能」で袋の膨らみを軽減
- 逆流防止弁付
- シンプルな操作性のやわらかいキャップ式排出口

アダプター*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
413437		45mm		
413438	透明	57mm	10枚	5,800円
413439		70mm		

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。



ベルト対応

※非課税

バリケア® ナチュラ™ ウロストミーパウチ



- 尿の排出が簡単な回転式タップを採用
- 回転式タップの赤い印で開閉状態を確認可能
- 逆流防止弁付

アダプター*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00371		38mm		
00372	透明	45mm	10枚	7,930円
00373		57mm		
00374	透明	70mm	10枚	8,040円

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。



ベルト対応

※非課税

バリケア® ナチュラ™ ユリナパウチ



- かさばらないパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付

アダプター*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00361		38mm		
00362	透明	45mm	10枚	7,370円
00363		57mm		

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。



ベルト対応

※非課税

二品系ストーマ装具

エステーム シナジー® シリーズ

粘着式カップリング方式で、軽くしなやかな装着感。

嵌合するためのプラスチックリングがなく、腹圧をかけずに装着できます。
単品系ストーマ装具のような軽くしなやかな装着感です。

粘着式 面板

平面型 (外周テープ付)

エステーム シナジー® ハイドロウェハー



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ
- 豊富なプレカットラインナップをご用意



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
09105	35mm	35mmまで		
09106	48mm	35~48mm	5枚	4,810円
09107	61mm	48~61mm		

※非課税

プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
09111	35mm	25mm	22~25mm		
09112	35mm	28mm	25~28mm		
09113	35mm	32mm	28~32mm	5枚	4,810円
09114	35mm	35mm	32~35mm		
09115	48mm	38mm	35~38mm		

※非課税

貼付日数の目安



平面型 (全面皮膚保護剤)

エステーム シナジー® ウェハー



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
09069	89mm	61~89mm	5枚	4,810円

※非課税

貼付日数の目安



粘着式 面板

硬性凸面型(自在孔外周テープ付)

エストイムシナジー® デュラヘーシブ® MCウェハー



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ



モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
09075	35mm	13~22mm	5枚	7,590円
09076	48mm	22~33mm		
09077	61mm	33~45mm		



粘着式 消化管用 ストーマ袋

消化管下部開放型

エストイムシナジー® インビジクローズ® ドレインパウチ




- 巻き上げ式のマジックテープで排出口をしっかり閉鎖
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 処理のしやすい幅広タイプの排出口



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
416795	透明	35mm	10枚	3,620円
416798		48mm		
416901		61mm		
416796	肌色	35mm	10枚	3,620円
416799		48mm		
416902		61mm		

エストイムシナジー® ドレインパウチ ELサイズ

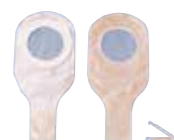

- クリップタイプ

クリップ10個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
09009	透明	89mm	10枚	3,330円

For Children

小児用ストーマ装具

大切なお子さまのために、より一層の安心と快適を…。
 お子さまのデリケートな肌に優しい小児用ストーマ装具リトルワン™。

小児のストーマケアに携わる
 皮膚・排泄ケア認定看護師よりさまざまなアイデアをいただき、
 小児のニーズに合わせて開発しました。
 小児の皮膚特性を考慮し、皮膚保護剤は、
 すべて肌に優しい「バリケア®」を使用しています。

単品系

消化管下部開放型 平面型(全面皮膚保護剤)

リトルワン™ ワンピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ

4.5kgまでのお子さま用



- 保護剤剥離紙にCuttingガイドを印刷
- 巻き上げ式マジックテープタイプ
- 面板サイズ:44×50mm

カスタムカット

注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00820	透明	縦25mmまで 横31mmまで	10枚	6,480円

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

バリケア® ワンピース ドレインパウチ 小児用



- クリップを使って排出口を留めるストーマ袋

カスタムカット、ワイヤークリップ15本付


注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
PDP5015	透明	50mmまで	15枚	6,480円

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

尿路用 平面型(全面皮膚保護剤)

バリケア® ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用)

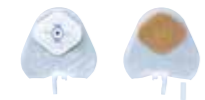

- 逆流防止弁付
- パイプ式尿タップで排出口を留めるストーマ袋

カスタムカット、アダプター*2個付

注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
PUP2515	透明	25mmまで	15枚	10,360円

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

二品系

面板

リトルワン™ ツーピース ウェハー ESサイズ

4.5kgまでのお子さま用



- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- おなかの形に沿う円形の皮膚保護剤を採用
- 面板サイズ:直径66mm

カスタムカット

注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00821	透明	23mmまで	5枚	4,210円

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

消化管下部開放型 平面型(全面皮膚保護剤)

リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ

4.5kgまでのお子さま用



- 柔軟性が高い、粘着式カップリング
- 巻き上げ式マジックテープタイプ

注文番号	色	入数	本体価格*
00824	透明	10枚	3,110円

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

面板 平面型(外周テープ付)

リトルワン™ ツーピース ハイドロウェハー

4.5kgを超えたお子さま用



- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- おなかの形に沿う円形の皮膚保護剤を採用
- 面板サイズ:保護剤部直径60mm、テープ部85×85mm

カスタムカット

注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00823	透明	4.8~31mmまで	5枚	4,210円

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

消化管下部開放型

リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ 透明

4.5kgを超えたお子さま用



- 柔軟性が高い、粘着式カップリング
- 2段階閉鎖の巻き上げ式マジックテープタイプ
- フィルター付

注文番号	色	入数	本体価格*
00825	透明	10枚	3,110円

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税

Combination product

ストーマ装具併用品

ストーマ装具を快適にお使いいただくための製品をご紹介します。

- エセンタ™ 皮膚被膜剤
- エセンタ™ 粘着剥離剤
- ニオフ消臭潤滑剤
- ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用
- ニオフ消臭スプレー
- ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤
- コンバテック シール(用手成形皮膚保護剤)
- バリケア® ペースト(練状皮膚保護剤)
- バリケア® パウダー(粉状皮膚保護剤)
- バリケア® ウェハー(板状皮膚保護剤)
- バリケア® ベルト
- オストミーシークレット

ESENTA™

エセンタ™

ひまく
エセンタ™
皮膚被膜剤

エセンタ™
粘着剥離剤
はがす



あらゆる角度から
スプレーできる

環境に配慮した
成分*を使用

お出かけしたくなる
スタイリッシュなデザイン

*地球温暖化への影響を低減するために、製品成分を噴射するガスの成分を変更しました。

エセンタ™ シリーズの特長

エセンタ™ 皮膚被膜剤

ひまく




ノンアルコール。
排泄物や粘着剤によるダメージから皮膚を保護します。

高性能シリコンベースで、薄い被膜を形成し、剥離刺激などのダメージから皮膚を保護します。皮膚のデリケートな方におすすめです


- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- ノンアルコール
- シリコン素材
- 速乾タイプ
- どの角度からもスプレー可能

エセンタ™ 皮膚被膜剤 スプレーの使い方

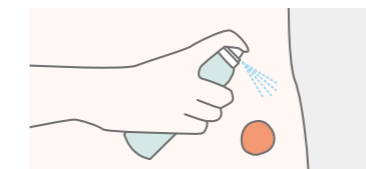

ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に噴霧してください。

エセンタ™ 皮膚被膜剤 ワイプの使い方

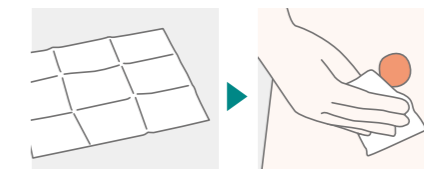

個包装を開封し、シートを広げてください。ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位を拭いてください。

注意 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

エセンタ™ 粘着剥離剤

はがす




剥がしやすく、肌にやさしい。
どの角度からもスプレー可能。快適で安心のストーマライフを。

ストーマ装具を剥がす際に使用、100%シリコン成分。ストーマ装具が簡単に剥がせます。

- 主にストーマ装具、医療用テープの剥離に使用
- ノンアルコール・ノンオイル
- シリコン素材
- 無臭、速乾タイプ
- どの角度からもスプレー可能

エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレーの使い方

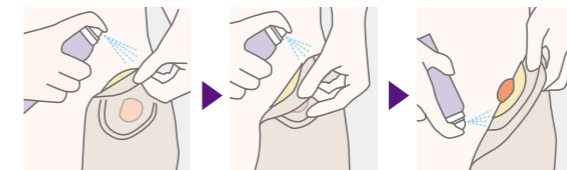


本品を粘着剤の周辺部に噴霧後、数秒間お待ちください。

粘着剤を皮膚からゆっくりと剥がしてください。

剥がれにくい場合、必要に応じて本品をさらに噴霧してください。

エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプの使い方

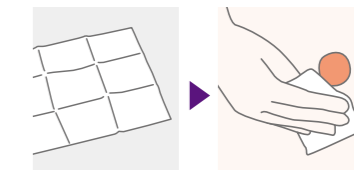

シートを広げ、速やかに、皮膚に残った粘着剤をシートでやさしく拭き取ります。その後、ストーマ周囲の皮膚を石鹸とぬるま湯で清潔にしてください。

注意 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

前向きな気持ちで
踏みだす、そばに。



人への“想い”を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(ニオフ)」から生まれた消臭潤滑剤です。ニオイの気ばかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭・潤滑実感でお応えします。

※消化管ストーマ専用



ボトル



ミニパック

✓ 消臭と潤滑、確かなWの実感

nioff独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭。高い潤滑作用で処理もスルッとスムーズです。

○抗菌成分(銅)で大腸菌の繁殖を抑制する抗菌性をもち、菌からのニオイの発生も抑制します。

✓ 安全性へのこだわり

高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うものだから各種の安全性試験をクリアしています。

○ノンアルコール ○パラベンフリー ○無着色 素材自体(銅イオン)の青色

✓ ソフトな容器で押しやすく、入れやすい


容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。中身が見えるので残量が確認しやすく、1回分の使用量の目安になるメモリ付きです。



nioff 消臭潤滑剤
優れた消臭のメカニズム

パナソニック独自の
「リコンビネーション消臭」

ニオイを香りでごまかすのではなく、銅イオンがニオイ分子に働きかけ、構造そのものを組み換えて消臭します。これがパナソニック独自の「リコンビネーション消臭」です。ニオイ分子自体が組み換わるため消えたニオイは戻りません。

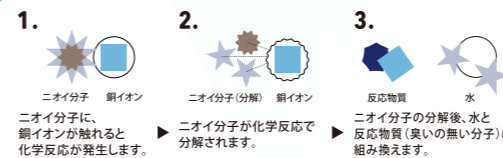

nioffシリーズを貫く
安全設計

安全性に徹底して
こだわっています

素材のすべてを、肌にやさしい材料のみで構成しました。確かな「安心」をめざして、外部機関による安全性確認試験も重ねました。


- ✓ AMES試験(復帰突然変異試験)
- ✓ 急性経口毒性試験
- ✓ 皮膚刺激性試験
- ✓ 眼刺激性試験
- ✓ 皮膚感受性試験

(試験機関: (株)薬物安全性試験センター)

使い方


1. ストーマ袋交換時

ストーマ袋にあらかじめ約8mL(大さじ半分程度)を投入し、よくなじませてから装着する。

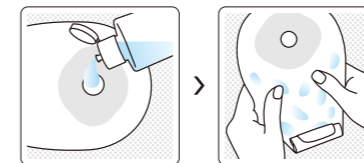

2. ストーマ袋装着中

装着中に排泄物を処理した際には、もう一度約8mL(大さじ半分程度)投入し、よくなじませる。

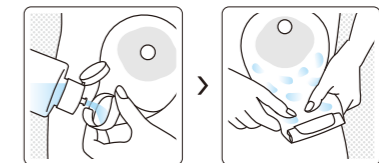

※使用により、便の色が黒くなる場合があります。

お得でエコな、つめかえ用も!




ご使用イメージ

1 ボトルのキャップを「ギュッ」と力を入れて開ける



2 ボトルの目盛りを見ながらゆっくりと注ぐ

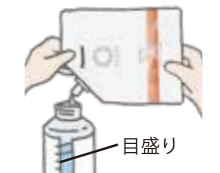

3 ボトルは定期的な交換をお勧めします

「ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用」2回購入に1回は、通常ボトル(250mL)の交換をお勧めします。

※衛生使用の観点と、ボトル劣化、破損の恐れがあるため、交換を強く推奨しています。




消臭実感と安全性に こだわりました。

パナソニックの独自技術で開発した
医療・介護向け本格プロユース

ニオフ消臭スプレー



使用イメージ

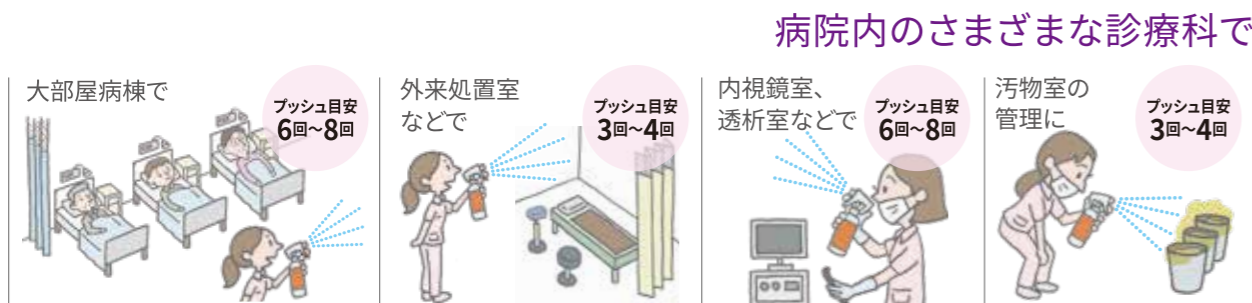


ニオフ消臭スプレーは、パナソニック化研株式会社が開発し、コンパテック ジャパン株式会社が販売する製品です。


ニオフ消臭スプレーの特長

1 ニオフの消臭テクノロジー nioff独自の技術「リコンビネーション消臭」

トイレ・便臭のニオイのほとんどは硫化水素。この硫化水素を消すのに効果がある酸化亜鉛を可溶化し、かつ透明な溶液にすることで着目した独自の消臭技術。「亜鉛イオン」がすばやい消臭性能を発揮します。

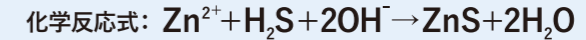

2 排泄物臭に即効性のある消臭効果。自壊創などの発するニオイも抑えます

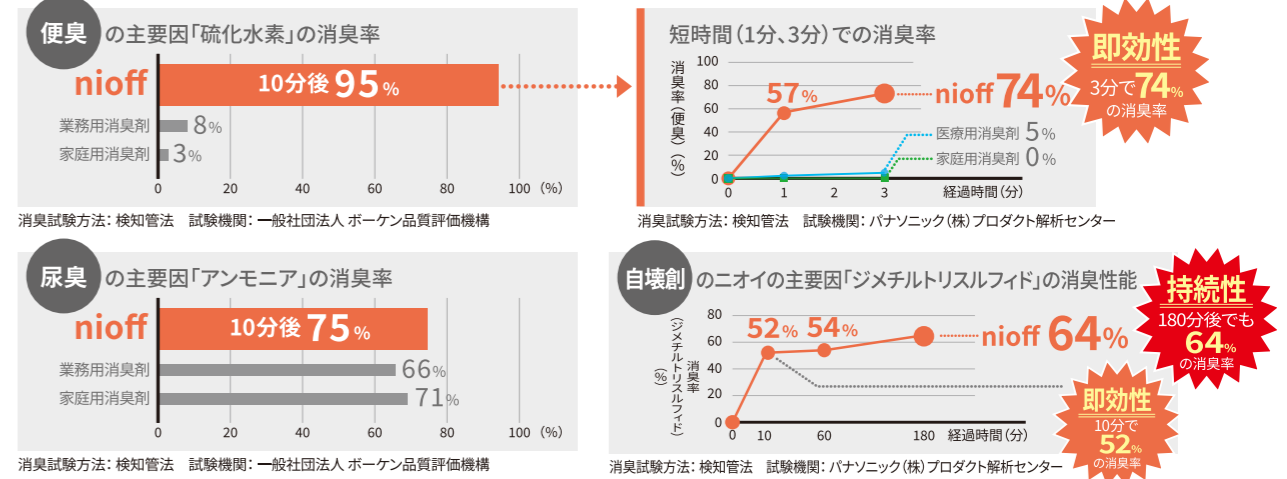

3 除菌効果でニオイの発生を抑制します


除菌試験結果 ニオフ消臭スプレーは、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対して、除菌効果があります。



4 確かな安全性

1.経口毒性 2.皮膚刺激性 3.眼刺激性 4.アレルギー性 5.変異原性
5つの安全性試験をクリア。化粧品やベビーシャンプーに使用されている安全性の高い材料のみで構成されています。さらに遺伝子に突然変異を引き起こす作用が無いことも、変異原性 (Ames試験) で確認済みです。

介護施設、在宅介護のシーンで

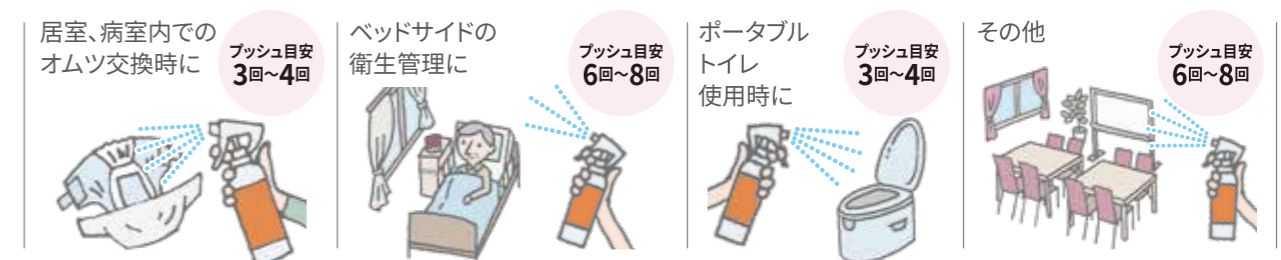

単品系

二品系

小児用

ストーマ装具併用品

ストーマ用洗腸用具

使用方法

単品系

二品系

小児用

ストーマ装具併用品

ストーマ用洗腸用具

使用方法

皮膚を守る

皮膚被膜剤

エセンタ™ 皮膚被膜剤 スプレー (シリコンベース)



- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- 排泄物や排泄物に含まれる酵素、および粘着剤によるダメージから皮膚を保護
- ノンアルコール、シリコン素材 ●速乾タイプ ●あらゆる角度から噴射可能

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
423288	50mL	1本	2,178円

エセンタ™ 皮膚被膜剤 ワイプ (シリコンベース)



- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- 排泄物や排泄物に含まれる酵素、および粘着剤によるダメージから皮膚を保護
- ノンアルコール、シリコン素材 ●速乾タイプ ●使いやすい大判ウェットティッシュタイプ

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
423282	30枚	3,564円

粘着剥離剤

エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレー (シリコンベース)



- 主にストーマ装具はがし用の粘着剥離剤
- 100%シリコンベース、ノンアルコール・ノンオイル
- 無臭、速乾タイプ ●あらゆる角度から噴射可能

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
423289	50mL	1本	2,640円

エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプ (シリコンベース)



- 主に皮膚上に残った糊残りはがし用の粘着剥離剤
- 100%シリコンベース、ノンアルコール・ノンオイル
- 無臭・速乾タイプ ●使いやすい大判ウェットティッシュタイプ

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
423281	30枚	3,564円

ニオイを防ぐ

ストーマ袋用消臭剤・排泄物凝固剤

ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 / ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用



ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤



ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用

- 特許取得のアクティブワン消臭コントロールシステムが不快なニオイとガスを同時に軽減・除去します
- ガスの軽減・除去により、ストーマ袋の膨らみ(バルーニング)を軽減・防止します
- ゲル化により、排泄物の逆流や面板からの漏れを防ぎます
また、手でストーマ袋を押さえると形状を平たくできます
- ゲル化した排泄物は、そのままトイレへ流すことが可能
- 携帯に便利な「携帯用」(5個入り)もあります

ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 (携帯用袋1枚入)

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
420791	100個	4,180円


ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
420792	5個	330円

漏れを防ぐ

用手成形皮膚保護剤

コンバテック シール

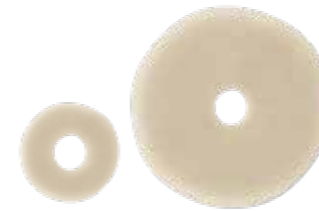

- ストーマ周囲の皺やくぼみを補正する用手成形皮膚保護剤
- 皺やくぼみにあわせ、必要量を手で練って自由に成形
- 水分吸収性に優れ、皮膚を排泄物の刺激からしっかり保護
- アルコールを含まず、乾燥しません
- バリケア® ペーストとの併用も可能

48mm薄型

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
413504	厚さ3.0mm×外径48mm	10枚	4,400円

48mm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
413503	厚さ4.0mm×外径48mm	10枚	4,950円

98mm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
413505	厚さ3.0mm×外径98mm	10枚	6,270円

練状皮膚保護剤

バリケア® ペースト



- ストーマ周囲の細かい皺・浅いくぼみを埋め、排泄物の漏れを防ぐ練状皮膚保護剤
- 皮膚保護剤「バリケア®」の親水性コロイド成分のみをペースト状にした製品
- アルコール成分含有

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
PA60	56.7g	1本	3,322円

粉状皮膚保護剤

バリケア® パウダー



- 水分を吸収しゲル状になり、排泄物の刺激から皮膚を保護
- 皮膚保護剤「バリケア®」の親水性コロイド成分のみを粉状にした製品

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
PW30	28.3g	1本	1,419円

板状皮膚保護剤

バリケア® ウェハー



- ストーマ周囲の深い皺・くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- 皮膚保護剤「バリケア®」を使用

10×10cm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
AC1010	10×10cm	10枚	9,262円

20×20cm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
AC2005	20×20cm	5枚	14,850円

ニオイを防ぐ

ストーマ袋用消臭潤滑剤／消臭スプレー

ニオフ消臭潤滑剤 ボトル／ミニパック



- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色
- ソフトな容器で押しやすく、入れやすい。外出にも便利なミニパックもあります

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
05016	250mL	1本	2,860円
05017	8mL	10袋	1,353円

ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用



- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色
- お得でエコ、詰め替えも楽チン
- 2回購入に1回は、通常ボトル (250mL) の交換をお勧めします

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
05025	400mL	1袋	3,500円

ニオフ消臭スプレー



- さまざまな場面で、ニオイ問題を解決
- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
05018	200mL	1本	1,430円
05019	50mL	1本	770円
05023	2L	1本	9,350円

その他

ストーマ用ベルト

バリケア® ベルト



- ベルトタブのついた製品の固定に使用
- 装具の安定感を高めます

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
VB01	55~106cm	1本	946円

ストーマ用下着

オストミーシークレット

- 内側ポケットでしっかり支えるから動いても安心
- 膨らみを軽減するすっきりとしたデザイン

クラシック(コットン) 女性用

注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09559		S		1枚	2,200円
09560	ライラック	M	綿・ポリウレタン	1枚	2,200円
09561		L		1枚	2,200円

※Sサイズ…W:66~71cm/H:83~88cm Mサイズ…W:71~76cm/H:91~96cm
Lサイズ…W:81~86cm/H:99~104cm

クラシック(マイクロファイバー) 女性用

注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09550		S		1枚	2,200円
09551	ベージュ	M	ポリエステル・ポリウレタン	1枚	2,200円
09552		L		1枚	2,200円
09553		S		1枚	2,200円
09554	ブラック	M	ポリエステル・ポリウレタン	1枚	2,200円
09555		L		1枚	2,200円

※Sサイズ…W:66~71cm/H:83~88cm Mサイズ…W:71~76cm/H:91~96cm
Lサイズ…W:81~86cm/H:99~104cm

ボクサーブリーフ 男性用

注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09567		M		1枚	2,420円
09568	グレー	L	綿・ポリウレタン	1枚	2,420円
09570		M		1枚	2,420円
09571	ブラック	L	綿・ポリウレタン	1枚	2,420円

※Mサイズ…W:81~86cm Lサイズ…W:91~96cm

クラシックラップ 女性&男性用

注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09581	ブラック	M	ポリエステル・ポリウレタン	1枚	2,640円
09582		L		1枚	2,640円

※Mサイズ…W:71~76cm Lサイズ…W:81~86cm

スィムラップ 女性&男性用

注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09575		S		1枚	3,080円
09576	ブラック	M	ナイロン・ポリウレタン	1枚	3,080円
09577		L		1枚	3,080円

※Sサイズ…W:66~71cm Mサイズ…W:71~76cm Lサイズ…W:81~86cm

オストミーシークレットについて

- ※各サイズについては、W(ウエスト)およびH(ヒップ)のサイズ表記をご参照ください。
- ※全ての商品は洗濯が可能です。

内側ポケットでしっかり支えるから動いても安心




全ての女性用パンツや男性用ボクサーパンツには前面に1つ大きなポケットがあります。



全てのラップ(腹巻き)には前面に左右に分かれた2つのポケットがあります。

ストーマの存在を忘れる、すっきりとした装着感。

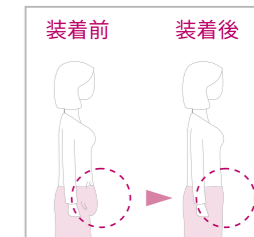

片手で操作できる、洗腸器です

無段階で流量を調節できるロールクランプ式調節器採用。
自然排便法によるセルフケアが可能な左側結腸ストーマの方に、
操作がしやすい洗腸関連製品をご紹介します。

バリケア® 新洗腸器 ストーマコーン付



- 流量を調整できる
ロールクランプ式調節器採用
- 注水口が大きく開く
オープントップタイプ
- 注入量と排出量が一目で分かる
100cc単位大型水量目盛付

注文番号	入数	本体価格(税込み)
SI01	1セット	5,940円

一般医療機器 ストーマ用洗浄キット
届出番号:13B1X10071000001

バリケア® ナチュラ™ 洗腸スリーブ



クリップ1個付

注文番号	フランジサイズ	入数	本体価格(税込み)
00382	45mm	5枚	5,346円
00383	57mm		

バリケア® 洗腸スリーブ用クリップ



注文番号	入数	本体価格(税込み)
IL10	10本	4,268円

バリケア® 洗腸用ストーマコーン



注文番号	入数	本体価格(税込み)
IC01	1個	2,376円

一般医療機器 ストーマ用洗浄キット
届出番号:13B1X10071000001

バリケア® ナチュラ™ 洗腸用フェースプレート



注文番号	規格	ストーマサイズ	入数	本体価格(税込み)
00387	45mm	44mmまで	1個	1,782円

洗腸法を行うにあたって

必ず自然排便法によるセルフケアが行えることが前提となります。
下記の点を考慮し、**医師と相談のうえ**、実施してください。

- 左側結腸ストーマであること
- ストーマ合併症がないこと
- 心疾患がないこと
- 一人で行えること

※高齢の方や一時的なストーマの場合は、不適応となります。

Irrigation Equipments

ストーマ用洗腸用具

セルフケアが可能な方のための洗腸製品をご紹介します。

How to use


製品の使用方法

- 単品系ストーマ装具の使用方法
- 二品系ストーマ装具の使用方法
- ストーマ袋の閉鎖具の使用方法
- ストーマ装具併用品の使用方法


単品系ストーマ装具の使用方法

面板の準備をします

カスタムカットの場合

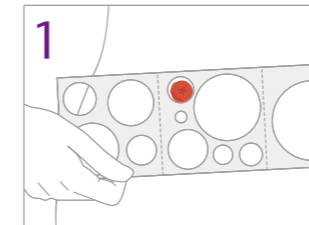


1 ストーマの大きさを測ります
メジャーリングガイド(計測紙)
または定規を使ってストーマサ
イズを測ります。

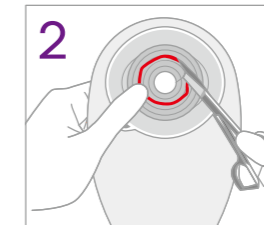

2 ストーマのサイズに合わせて
装具を切ります
面板の裏側に、ストーマの形に印をつ
け、印の外側をハサミで切ります。穴の切
り口を指でなでて滑らかにしておきます。
※ストーマ袋に空気を入れてから切ってください。面板を切
るときに袋まで切ってしまうことを防止できます。




3 ストーマ袋を装着する前に、
少量の空気を入れます
ストーマ袋を装着する前に、ストーマ袋
を少し広げ、少量の空気をストーマ袋
の中に入れてください。ストーマ袋の中
に空気が入っていることにより、排泄物
が排出口の方に移動しやすくなります。
※ストーマ袋の空気が抜けすぎる場合は、付属のフィ
ルターシールを貼付しましょう。ストーマ袋の排出口
は閉じておきます。

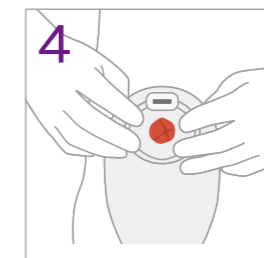


4 面板を貼付します
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして
貼ります。やわらかい装具の場合、下か
ら折るように貼ると、ストーマを見なが
ら落ちついて貼ることができます。皮膚
保護剤全体を30秒ほど押さえ、スト
ーマの周囲をしっかり密着させます。テー
プ付タイプの場合は、最後にテープを
皺が寄らないように密着させます。
※入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルタ
ーシールを貼付してください。


プレカットの場合

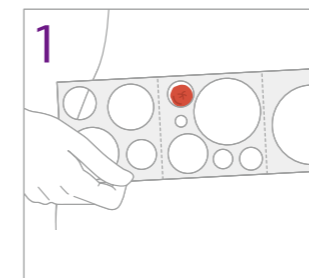

1 ストーマの大きさを測り、
ご自身のストーマサイズに
合ったプレカットを選択します
メジャーリングガイド(計測紙)ま
たは定規を使ってストーマサ
イズを測ります。ストーマの最大径と
同じ、または少し大きいプレカット
サイズを選択します。皮膚保護剤
を切る必要はありません。

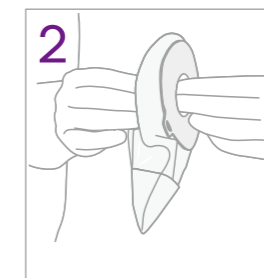

2 ストーマ袋を装着する前に、
少量の空気を入れます
ストーマ袋を装着する前に、ストーマ袋
を少し広げ、少量の空気をストーマ袋
の中に入れてください。ストーマ袋の中
に空気が入っていることにより、排泄物
が排出口の方に移動しやすくなります。
※ストーマ袋の空気が抜けすぎる場合は、付属のフィ
ルターシールを貼付しましょう。ストーマ袋の排出口
は閉じておきます。

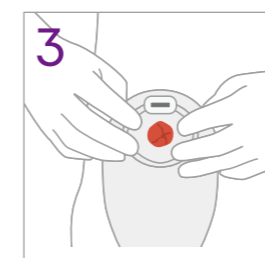

3 面板を貼付します
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがし面
板を下から折るように貼ると、スト
ーマを見ながら落ちついて貼ることが
できます。皮膚保護剤全体を30秒ほど押
さえ、ストーマの周囲をしっかり密着さ
せます。テープ付タイプの場合は、皮膚保
護剤を密着させた後にテープに皺が
寄らないように密着させます。
※入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルタ
ーシールを貼付してください。

ストーマ袋の使用方法

エスティームボディ™ (消化管用・尿路用) の場合

装具の貼り方 (消化管用・尿路用共通)

- 1 剥離紙をはがします。
- 2 ストーマを観察しながら貼付します。
- 3 軽く押さえた状態を約60秒程度キープして密着させます。

排出口の開け方・閉じ方 (消化管用)

- 1 ①～③フラップに向かってプレートを3回折り上げます。
- 2 ④排出口を3回折りたたんだ状態でしっかり押さえます。
- 3 ⑤フラップをおろし、マジックテープをあわせてプチプチと押し込んでしっかりと押さえます。
- 4
- 5

排出口の開け方・閉じ方 (尿路用)

- 1 キャップを上向きにして手前に傾けます。
- 2 キャップの根本を握って開けます。
- 3 排出口をトイレに向けて尿を排出します。
- 4 排出口に残った尿をふき取ります。
- 5 排出口を上に向けてキャップを閉じます。

エスティーム™ やわらか凸・エスティーム™ やわらか凸 シャロー (消化管用) の場合

装具の貼り方

- 1 剥離紙をはがします。
- 2 スリットからストーマを観察しながら貼付します。
- 3 必要に応じてフィルターシールを貼ります。

排出口の閉じ方 排出口端にあるプレートを5回折り上げます。

- 1
- 2 ②1回折り上げた状態。
- 3 ③5回折り上げた状態。
- 4 ④フラップをおろし、マジックテープを合わせ排出口を閉じます。
- 5 ⑤閉じた排出口を不織布の裏側へ隠すことができます。

やわらかイレオシリーズの場合

排出口の開け方・閉じ方

- 1 排出口を上向きにします。
- 2 キャップを外します。
- 3 下向きにして排出します。
- 4 排出口を上に向け、残った便をふき取った後、排出口を閉じます。

エステーム™ モルダブル製品の場合

モルダブルディスクを準備します

1 **モルダブルディスク** モルダブルディスク(円盤状皮膚保護剤)をストーマ袋から取り外します。

2 『1』の剥離紙 『1』の剥離紙をはがします。こちら側が巻き上げる側になります。

3 親指(あるいは他の指)を初孔の中心において皮膚保護剤を巻き広げ、穴をストーマのサイズに合わせて成形します。このとき、モルダブルディスク自体をより大きくしようと引き伸ばしたり、カットしたりしないでください。

4 ストーマの上から巻き上げられた穴の部分を合わせてみて、十分に皮膚保護剤が巻き広げられていることを確認します。

モルダブルディスクを貼付します

5 『2』の剥離紙 『2』の剥離紙をはがします。こちら側が皮膚貼付側になります。

6 モルダブルディスクを貼付します。モルダブルディスクがストーマ周囲の皮膚となじむように優しく押し当てます。ストーマ近接部の皮膚が露出している場合は、巻き上げられた皮膚保護剤を優しくそっとストーマに向かって戻します。

7 『3』の剥離紙 『3』の剥離紙をはがします。

ストーマ袋についている面板を貼付します

8 ストーマ袋をつまんで広げ、空気を入れます。ストーマ袋の排出口は閉じておきます。

9 ストーマ袋についている面板から剥離紙をはがします。

10 ストーマ袋についている面板をモルダブルディスクと周囲皮膚へ貼付します。

11 ストーマ袋の上から皮膚保護剤全体を軽く押さえ、しっかりと密着していることを確認し、そのまま30秒ほど押さええます。
※入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。

エステーム™ やわらか凸ウロ(尿路用)・エステーム™ やわらか凸シャローウロ(尿路用)の場合

装具の貼り方

1 **2**

①剥離紙をはがします。
②スリットからストーマを観察しながら貼付します。

排出口の開け方・閉じ方

1 **2**


①排出口を上向きにします。
②キャップを外します。
③下向きにして排出します。
④排出口を上に向け、残った尿を拭き取った後、排出口を閉じます。

3 **4**

アクティブライフ®シリーズ、エステーム™ シリーズ、ナチュラル™ シリーズ(尿路用)の場合

※単品系、二品系共通の使用法です

ウロストミーパウチ

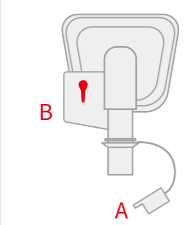

<開け方>
①排出口を上向きにしてキャップ(A)を開けます。
②回転式タップ(B)を赤い印が見えるように回転し、排出します。


<閉じ方>
①回転式タップ(B)を赤い印が見えないように回転します。
②キャップ(A)を閉じます。

ユリナパウチ



排出口を上向きにしてキャップを外し、排出口を下向きにして排出します。

二品系ストーマ装具の使用法

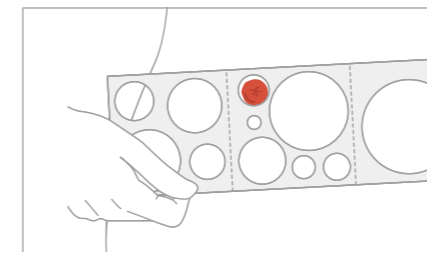

ストーマの大きさを測ります
メジャーリングガイド(計測紙)または定規を使ってストーマサイズを測ります。

面板ストーマ孔を成形し貼付します

モルダブル製品(平面)の場合

- 皮膚保護剤部分を巻き上げます**
※白い剥離紙と透明のフィルムをはがさないで成形してください。
親指(あるいは他の指)を初孔の中心において巻き上げます。穴がストーマのサイズ、または、それ以上の大きさまで広げられていることを確認します。
※尿路ストーマの場合はロールガーゼで尿を吸いとりながら行うと交換がスムーズにできます。
- 面板を貼付します**
穴を成形したあと、透明のフィルムをはがし、面板を貼付します。ストーマが面板の中心にくるようにして腹部にあてます。
※白い剥離紙をはがさないでください。
- 皮膚保護剤とストーマの間に隙間がないことを確認します**
広げられた皮膚保護剤は装着後、自然に内側に向かって戻り、ストーマに優しくフィットします。面板貼付後さらに必要であれば、巻き上げられた皮膚保護剤をストーマに向かって戻すように調整します。
- 皮膚保護剤を密着させます**
指で巻き上げられた皮膚保護剤をストーマ周囲に沿って優しく押し付けてください。さらに指または手の平で皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、確実に密着させてください。
- 粘着テープを貼ります**
粘着テープから白い剥離紙をはがし、皺にならないように貼ってください。
※排泄物が出る場合は先にストーマ袋を装着してください。

モルダブル製品(凸面)の場合

- 保護用プラスチックシートにストーマの外形をペンなどで描きます。(メジャーリングガイド等を利用するとよいでしょう)**
※白い剥離紙をはがさないでください。
- ストーマ袋装着側より、プラスチックシートの中央部を指で巻き上げます。
- プラスチックシートをつけたままでストーマの外形を描いた線まで指で皮膚保護剤を巻き上げ、穴をストーマの形に広げます。
- 巻き上げた部分を指で押しつけます。保護用プラスチックシートをはがし、面板を貼付します。

インビジクローズ® ドレインパウチの場合

※単品系、二品系共通の使用法です

ナチュラル™ プラス/ エスティーム シナジー®/ エスティーム™

排出口を閉じる

- 1 排出口端のプレートを折り上げます。
- 2 プレートを1回折り上げた状態。
- 3 プレートを2回折り上げた状態。
- 4 プレートを3回折り上げた状態。
- 5 フラップをおろし、マジックテープを合わせ排出口を閉じます。

排出口をパウチポケットに収納

- 1 外側のポケットに両手の親指を差し込みます。
- 2 折りたたんだ部分全体を内側にひっくり返します。
- 3 排出口を収納し、袋をコンパクトにすることができます。

排出口を開く

- 1 フラップを持ち上げ、マジックテープを剥がします。
- 2 プレート両端のくぼみ位置に指を合わせます。
- 3 排出口を開きます。

リトルワン™

- 1 排出口端の白いプレートを4回折り上げます。重なったマジックテープ部がプチプチと音がするまでしっかり押し、排出口を閉じます。これで手順は完了です。
- 2
- 3 外側のポケットに指を引っ掛け、折りたたんだ排出口ごと内側へひっくり返せば、排出口を収納し、袋をコンパクトにすることができます。
- 4
- 5

面板の準備をします

カスタムカットの場合

1 **ストーマのサイズに合わせて
面板を切ります**
ボールペンで印をつける
面板の裏側に、ストーマの形に印をつけ、印の外側をハサミで切ります。ストーマに面板をあてて、穴のサイズを確認しながら、適したサイズに切ってください。穴の切り口は指でなでて滑らかにしておきます。

2 **面板を貼付します**
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして貼ります。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかりと密着させます。テープ付タイプの場合は、テープに皺が寄らないように密着させます。

プレカットの場合

1 **ご自身のストーマサイズに合った
プレカットサイズを選びます**
ストーマの最大径と同じ、または少し大きいサイズを選択します。皮膚保護剤を切る必要はありません。
※白い剥離紙ははがさないでください。

2 **面板を貼付します**
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして面板を貼ります。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかりと密着させます。皮膚保護剤部分を密着させてから、テープに皺が寄らないように密着させます。
※排泄物が出る場合はストーマ袋を装着してからテープを貼付します。

ストーマ袋を装着する前に、少量の空気を入れます

ストーマ袋を装着する前に、ストーマ袋を少し広げ、少量の空気をストーマ袋の中に入れてください。ストーマ袋の中に空気が入っていることにより、排泄物が排出口の方に移動しやすくなります。
※ストーマ袋の空気が抜けすぎる場合は、付属のフィルターシールを貼付しましょう。

ストーマ袋の装着と取り外し ※面板と同ブランド、同フランジサイズのストーマ袋を使用してください。

いずれのタイプの製品をお使いの場合も、面板とストーマ袋を嵌合した後は、ストーマ袋を優しく引っ張り、確実に装着されたことを確認してください。

〈ナチュラ™ アコーディオン®・バリケア® ナチュラ™の場合〉
面板とストーマ袋の嵌合リング下部の溝を合わせ、「パチッパチッ」という音を確認しながら、下から順に上部に向かって嵌めてください。

〈エステーム シナジー®の場合〉
ストーマ袋の粘着部の下側から順にウェハー（面板）に粘着させて装着します。

※入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。

ストーマ袋を外すときは、ストーマ袋のつまみを下方向に引いて面板から外してください。

エステーム シナジー®の場合

ストーマ装具併用品の使用法

補正用皮膚保護剤の使い分け

ストーマ周囲皮膚に皺やくぼみがある場合

コンバテック シール 皺やくぼみに合わせて、自由に成形して使用します。アルコールを含んでいません。

1 両側の剥離紙をはがし、必要量を取ります。

2 よく練り、補正部に合わせて成形します。

3 コンバテック シールを補正部に貼付し、ストーマ装具を貼付します。

4 装具の粘着面に貼付して、使用することもできます。

バリケア® ペースト 細かい皺がある場合に使用します。剥離紙をはがした後、皺の位置に応じて開けた穴のまぎわにペーストを塗ります。細かい皺が平坦になる程度の少量を塗るのが効果的です。30秒ほどペーストを乾かした後、装具を貼付してください。アルコールを含んでいるため、傷がある場合には直接塗らないでください。

バリケア® ウェハー コンバテック シールでは補正しきれない深い皺やくぼみを補正します。深い皺やくぼみが平坦になるよう、ハサミで切って使用します。排泄物が水様性の場合、バリケア® ウェハーと皮膚の段差をバリケア® ペーストやコンバテック シールなどでならかになるよう整えるとよいでしょう。

ストーマと皮膚保護剤の間に隙間がある場合

バリケア® パウダー ストーマと皮膚保護剤の小さな隙間にふりかけます。水分を吸収するとゲル状になり、排泄物の刺激から皮膚を保護します。
※単品系装具をお使いの場合、バリケア® パウダーをストーマ周囲にふりかけた後、余分な粉をはたいてから、装具を貼付します。

エセンタ™ シリーズ ワイプタイプの場合


皮膚被膜剤の場合
面板貼付前にシートを広げ、ストーマ周辺を拭き、乾かします。皮膚被膜剤は、薄い被膜を皮膚に作るものです。この被膜が粘着テープなどの剥離刺激を軽減し、排泄物が皮膚へ付着するのを防ぎます。皮膚被膜剤が乾いた後、粘着テープなどを貼付します。

粘着剥離剤の場合
皮膚保護剤や粘着テープをはがすときに使用します。端から少しめぐりストーマ周辺を拭き、ゆっくりはがしていきます。このとき、端から少しずつめくっていきます。

エセンタ™ シリーズ スプレータイプの場合


皮膚被膜剤の場合

面板貼付前にストーマ周辺に皮膚被膜剤をふきつけます。
皮膚被膜剤は、薄い被膜を皮膚に作るものです。この被膜が粘着テープなどの剥離刺激を軽減し、排泄物が皮膚へ付着するのを防ぎます。
皮膚被膜剤が乾いた後、粘着テープなどを貼付します。

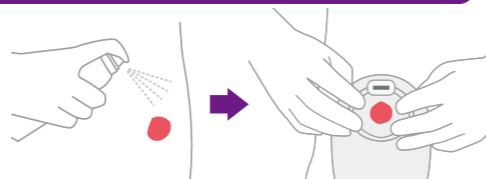


粘着剥離剤の場合

皮膚保護剤や粘着テープをはがすときに使用します。
端から少しめくり「エセンタ™粘着剥離剤」をふきかけながらゆっくりはがしていきます。
このとき、端から少しずつめくっていきます。

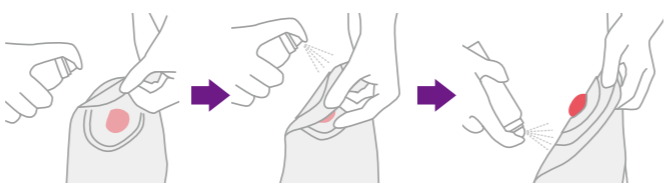

ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤の場合

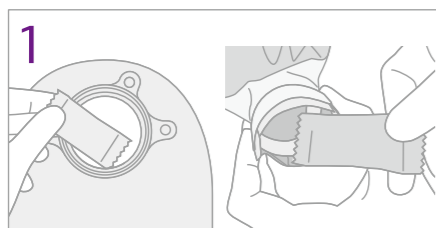


ストーマ袋をご使用前に

個包装された本品1個を開封せずに、ストーマ袋の中に入れます。



排泄物をしっかりゲル化


ストーマ袋内の水様性排泄物は、数分でゲル化されます。ゲル化した排泄物は、通常と同様の方法で便器へ廃棄します。

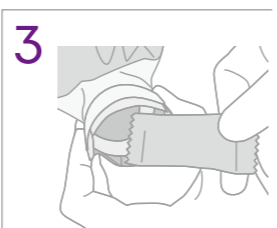

排泄物廃棄後


排出口から新たな本品1個をストーマ袋の中に入れます。

ニオフ消臭潤滑剤の場合

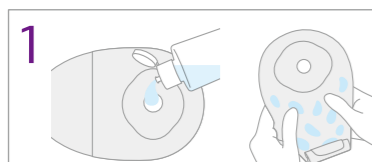

ストーマ袋交換時


剥離紙を外す前にストーマ袋にあらかじめ約8mL(大さじ半分程度)を投入し、よくなじませてから装着します。

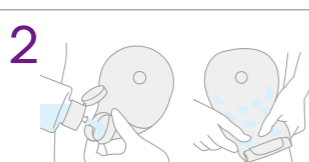

ストーマ袋装着中

装着中に排泄物を処理した際には、もう一度約8mL(大さじ半分程度)を投入し、よくなじませます。

ニオフ消臭スプレーの場合

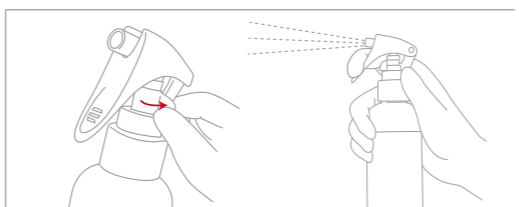

ストッパーを左右どちらか止まるまで回し開栓。スプレーノズルグリップをしっかり握って噴霧。目標対象物に対して20~30cm離して噴霧してください。

ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用の場合



1 ボトルのキャップを力を入れて開ける
開封の際は、「ギョツ」と力を入れて開封します。



2 つめかえ用のキャップを開ける
フタを開ける際は、中身が出てしまわないように袋を強く持ち過ぎないように注意してください。



3 目盛りを見ながらゆっくりと注ぐ
ボトルの目盛りを見ながら溢れないようにゆっくり注ぎます。



4 ボトルは定期的な交換をお勧めします
2回購入に1回は、通常ボトル(250mL)の交換を。
※衛生使用の観点と、ボトル劣化、破損の恐れがあるため、交換を強く推奨しています。

索引(五十音順)

品名	ページ	品名	ページ
アクティブライブ® ウロストミーパウチ(尿路用)	36	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフレンジアコーデオソ®	38
アクティブライブ® 術後用パウチ S	35	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフレンジアコーデオソ®	38
アクティブライブ® ドレインパウチ CD	35	ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ	44
アクティブライブ® ドレインパウチ DX	35	ナチュラ™ プラス ウロストミーパウチ(尿路用)	46
アクティブライブ® ドレインパウチ ST-2	35	ナチュラ™ プラス クローズパウチ	45
アクティブライブ® ユリナパウチ CD(尿路用)	36	ナチュラ™ プラス クローズパウチ コンパクト	45
アクティブライブ® ユリナパウチ(尿路用)	36	ニオフ消臭潤滑剤	60
エステーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	32	ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用	60
エステーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ CVX	33	ニオフ消臭スプレー	60
エステーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期	32	バリケア® ウェハー	59
エステーム™ ウロ 長期(尿路用)	34	バリケア® 新洗腸器 ストーマコーン付	63
エステーム™ クローズパウチ	34	バリケア® 洗腸スリブ用クリップ	63
エステーム™ クローズパウチ(コンパクト)	34	バリケア® 洗腸用ストーマコーン	63
エステーム シナジー® インビジクローズ® ドレインパウチ	48	バリケア® ナチュラ™ Mフレンジ	40
エステーム シナジー® ウェハー	47	バリケア® ナチュラ™ Mフレンジアコーデオソ®	38
エステーム シナジー® デュラヘーシブ® MCウェハー	48	バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ	45
エステーム シナジー® ドレインパウチ ELサイズ	48	バリケア® ナチュラ™ ウロストミーパウチ(尿路用)	46
エステーム シナジー® ハイドロウェハー	47	バリケア® ナチュラ™ コンベックスインサート(凸型嵌め込み具)	42
エステーム™ ドレインパウチ	33	バリケア® ナチュラ™ ソフトMフレンジ	40
エステーム™ ボディ(消化管用)	26	バリケア® ナチュラ™ ソフトフレンジ	41
エステーム™ ボディウロ(尿路用)	27	バリケア® ナチュラ™ ソフトフレンジアコーデオソ®	38
エステーム™ モルダブル	31	バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ	44
エステーム™ やわらか凸ウロ(尿路用)	30	バリケア® ナチュラ™ ハイドロフレンジ	41
エステーム™ やわらか凸(消化管用)	28	バリケア® ナチュラ™ フレンジ	42
エステーム™ やわらか凸 シャローウロ(尿路用)	30	バリケア® ナチュラ™ ユリナパウチ(尿路用)	46
エステーム™ やわらか凸 シャロー(消化管用)	28	バリケア® ナチュラ™ 洗腸スリブ	63
エセンタ™ 粘着剥離剤	58	バリケア® ナチュラ™ 洗腸用フェースプレート	63
エセンタ™ 皮膚被膜剤	58	バリケア® パウダー	59
オストミーシークレット クラシック(コットン) 女性用	61	バリケア® ペースト	59
オストミーシークレット クラシック(マイクロファイバー) 女性用	61	バリケア® ベルト	61
オストミーシークレット クラシックラップ 女性&男性用	61	バリケア® ワンピース ドレインパウチ 小児用	50
オストミーシークレット スイムラップ 女性&男性用	61	バリケア® ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用)	50
オストミーシークレット ボクサーブリーフ 男性用	61	やわらか凸 イレオ	29
コンパテックシール	59	やわらか凸 シャロー イレオ	29
ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤	58	やわらか凸 平面 イレオ	29
デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフレンジ	43	リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ	50
デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフレンジ	43	リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ 透明	50
デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフレンジ	40	リトルワン™ ツーピース ウェハー ESサイズ	50
デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフレンジ	41	リトルワン™ ツーピース ハイドロウェハー	50
デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフレンジ	42	リトルワン™ ワンピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ	50
デュラヘーシブ® ナチュラ™ フレンジ	42		
デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフレンジアコーデオソ®	39		
デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフレンジアコーデオソ®	39		

索引(注文番号順) 00200 - 09571

注文番号	品名	ページ
00200	アクティブライフ® ドレインパウチ ST-2	カスタムカット 19-64mm 透明 35
00246	バリケア® ナチュラ™ ハイドロフランジ	カスタムカット 38mm 17-23mm 41
00247		カスタムカット 45mm 23-30mm 41
00248		カスタムカット 57mm 30-42mm 41
00249		カスタムカット 70mm 42-55mm 41
00251	バリケア® ナチュラ™ フランジ	カスタムカット 38mm 17-23mm 42
00252		カスタムカット 45mm 23-30mm 42
00253		カスタムカット 57mm 30-42mm 42
00254		カスタムカット 70mm 42-55mm 42
00255		カスタムカット 100mm 55-85mm 42
00261	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ	カスタムカット 38mm 17-23mm 41
00262		カスタムカット 45mm 23-30mm 41
00263		カスタムカット 57mm 30-42mm 41
00264	デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm 43
00265		モルダブル 45mm M 22-33mm 43
00266		モルダブル 57mm L 33-45mm 43
00271	デュラヘーシブ® ナチュラ™ フランジ	カスタムカット 38mm 23mmまで 42
00272		カスタムカット 45mm 23-30mm 42
00273		カスタムカット 57mm 30-42mm 42
00277	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ	カスタムカット 38mm 23mmまで 42
00278		カスタムカット 45mm 23-30mm 42
00279		カスタムカット 57mm 30-42mm 42
00281	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ	プレカット 45mm 13mm 43
00282		プレカット 45mm 16mm 43
00283		プレカット 45mm 19mm 43
00284		プレカット 45mm 22mm 43
00285		プレカット 45mm 25mm 43
00286		プレカット 45mm 28mm 43
00287		プレカット 45mm 32mm 43
00288		プレカット 45mm 35mm 43
00290	バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ	38mm 肌色 入数10枚 44
00291		45mm 肌色 入数10枚 44
00292		45mm 肌色 入数30枚 44
00293		57mm 肌色 入数10枚 44
00295	バリケア® ナチュラ™ Mフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm 40
00296		モルダブル 45mm M 22-33mm 40
00297		モルダブル 57mm L 33-45mm 40
00298		モルダブル 70mm XL 45-56mm 40
00305	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm 40
00306		モルダブル 45mm M 22-33mm 40
00307		モルダブル 57mm L 33-45mm 40
00308		モルダブル 70mm XL 45-56mm 40
00311	バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ	38mm 透明 入数10枚 44
00312		45mm 透明 入数10枚 44
00313		45mm 透明 入数30枚 44
00314		57mm 透明 入数10枚 44
00315		70mm 透明 入数10枚 44
00316		100mm 透明 入数10枚 44
00320	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ	プレカット 45mm 16mm 41
00321		プレカット 45mm 19mm 41
00322		プレカット 45mm 22mm 41
00323		プレカット 45mm 25mm 41
00324		プレカット 45mm 28mm 41
00325		プレカット 45mm 32mm 41
00326		プレカット 45mm 35mm 41
00332	バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ	45mm 肌色 フィルター付 45
00333		57mm 肌色 フィルター付 45
00334		70mm 肌色 フィルター付 45

注文番号	品名	ページ
00361	バリケア® ナチュラ™ ユリナパウチ(尿路用)	38mm 透明 46
00362		45mm 透明 46
00363		57mm 透明 46
00371	バリケア® ナチュラ™ ウロストミーパウチ(尿路用)	38mm 透明 46
00372		45mm 透明 46
00373		57mm 透明 46
00374		70mm 透明 46
00382	バリケア® ナチュラ™ 洗腸スリーブ	45mm 63
00383		57mm 63
00387	バリケア® ナチュラ™ 洗腸用フェースプレート	45mm 44mmまで 63
00391	バリケア® ナチュラ™ コンベックスインサート	38mm S (19mm) 13mm以下 42
00392	(凸型嵌め込み具)	38mm M (22mm) 13-16mm 42
00393		38mm L (25mm) 16-19mm 42
00394		45mm S (29mm) 19-22mm 42
00395		45mm M (32mm) 22-25mm 42
00396		45mm L (35mm) 25-29mm 42
00397		57mm S (38mm) 29-32mm 42
00398		57mm M (41mm) 32-35mm 42
00820	リトルワン® ワンピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ	カスタムカット 透明 縦25mmまで横31mmまで 50
00821	リトルワン® ツーピース ウェハー ESサイズ	カスタムカット 23mmまで 50
00823	リトルワン® ツーピース ハイドロウェハー	カスタムカット 4.8-31mmまで 50
00824	リトルワン® ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ	透明 50
00825	リトルワン® ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ 透明	透明 フィルター付 50
00925	アクティブライフ® ウロストミーパウチ(尿路用)	プレカット 19mm 透明 36
00926		プレカット 22mm 透明 36
00927		プレカット 25mm 透明 36
00928		プレカット 28mm 透明 36
00929		プレカット 32mm 透明 36
05016	ニオフ消臭潤滑剤 ボトル	250mL 60
05017	ニオフ消臭潤滑剤 ミニパック	8mL 60
05018	ニオフ消臭スプレー	200mL 60
05019		50mL 60
05023		2L 60
05025	ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用	400mL 60
09009	エスティーム シナジー® ドレインパウチ ELサイズ	89mm 透明 48
09069	エスティーム シナジー® ウェハー	カスタムカット 89mm 61-89mm 47
09075	エスティーム シナジー® デュラヘーシブ® MCウェハー	モルダブル 35mm 13-22mm 48
09076		モルダブル 48mm 22-33mm 48
09077		モルダブル 61mm 33-45mm 48
09105	エスティーム シナジー® ハイドロウェハー	カスタムカット 35mm 35mmまで 47
09106		カスタムカット 48mm 35-48mm 47
09107		カスタムカット 61mm 48-61mm 47
09111		プレカット 35mm 25mm 47
09112		プレカット 35mm 28mm 47
09113		プレカット 35mm 32mm 47
09114		プレカット 35mm 35mm 47
09115		プレカット 48mm 38mm 47
09550	オストミー シークレット クラシック(マイクロファイバー) 女性用	S ベージュ 61
09551		M ベージュ 61
09552		L ベージュ 61
09553		S ブラック 61
09554		M ブラック 61
09555		L ブラック 61
09559	クラシック(コットン) 女性用	S ライラック 61
09560		M ライラック 61
09561		L ライラック 61
09567	ボクサーブリーフ 男性用	M グレー 61
09568		L グレー 61
09570		M ブラック 61
09571		L ブラック 61

注文番号	品名	ページ
09575	オストミー シークレット スイム ラップ 女性&男性用 S ブラック	61
09576	M ブラック	61
09577	L ブラック	61
09581	クラシックラップ 女性&男性用 M ブラック	61
09582	L ブラック	61
413417	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフランチ	41
413418	モルダブル 45mm S 13-22mm	41
413419	モルダブル 45mm M 22-33mm	41
413420	モルダブル 57mm L 33-45mm	41
413421	モルダブル 70mm XL 45-56mm	41
413421	バリケア® ナチュラ™ ソフトMフランチ	40
413422	モルダブル 45mm S 13-22mm	40
413422	モルダブル 45mm M 22-33mm	40
413423	モルダブル 57mm L 33-45mm	40
413424	モルダブル 70mm XL 45-56mm	40
413437	ナチュラ™ プラス ウロストミーパウチ	46
413438	45mm 透明	46
413438	57mm 透明	46
413439	70mm 透明	46
413503	コンパテック シール	59
413503	48mm 厚さ4mm×外径48mm	59
413504	48mm薄型 厚さ3mm×外径48mm	59
413505	98mm 厚さ3mm×外径98mm	59
413515	エスティーム™ モルダブル	31
413516	モルダブル M 21-30mm 透明 フィルター付	31
413517	モルダブル L 31-40mm 透明 フィルター付	31
413518	モルダブル XL 41-50mm 透明 フィルター付	31
413518	モルダブル M 21-30mm 透明	31
413519	モルダブル L 31-40mm 透明	31
413521	モルダブル M 21-30mm 肌色 フィルター付	31
413522	モルダブル L 31-40mm 肌色 フィルター付	31
413523	モルダブル XL 41-50mm 肌色 フィルター付	31
416414	ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ	44
416415	38mm 透明 フィルター付	44
416415	38mm 肌色 フィルター付	44
416416	45mm 透明 フィルター付	44
416417	45mm 肌色 フィルター付	44
416418	45mm 透明	44
416419	57mm 透明 フィルター付	44
416420	57mm 肌色 フィルター付	44
416421	57mm 透明	44
416422	70mm 透明 フィルター付	44
416423	70mm 肌色 フィルター付	44
416424	70mm 透明	44
416472	100mm 透明	44
416700	エスティーム™ クローズパウチ	34
416701	カスタムカット 20-70mm 透明 フィルター付	34
416701	カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	34
416703	プレカット 25mm 透明 フィルター付	34
416704	プレカット 25mm 肌色 フィルター付	34
416706	プレカット 30mm 透明 フィルター付	34
416707	プレカット 30mm 肌色 フィルター付	34
416712	プレカット 40mm 透明 フィルター付	34
416713	プレカット 40mm 肌色 フィルター付	34
416717	エスティーム™ ドレインパウチ	33
416718	カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	33
416718	カスタムカット 20-70mm 透明 フィルター付	32
416719	カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	32
416723	エスティーム™ ドレインパウチ	33
416723	プレカット 25mm 肌色 フィルター付	33
416724	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	32
416724	プレカット 25mm 透明 フィルター付	32
416725	プレカット 25mm 肌色 フィルター付	32
416727	エスティーム™ ドレインパウチ	33
416727	プレカット 30mm 肌色 フィルター付	33
416728	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	32
416728	プレカット 30mm 透明 フィルター付	32
416729	プレカット 30mm 肌色 フィルター付	32
416732	プレカット 35mm 透明 フィルター付	32
416733	プレカット 35mm 肌色 フィルター付	32
416735	エスティーム™ ドレインパウチ	33
416735	プレカット 40mm 肌色 フィルター付	33
416736	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	32
416736	プレカット 40mm 透明 フィルター付	32
416737	プレカット 40mm 肌色 フィルター付	32

注文番号	品名	ページ
416738	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ CVX	33
416738	プレカット 19mm 透明 フィルター付	33
416739	プレカット 19mm 肌色 フィルター付	33
416740	プレカット 22mm 透明 フィルター付	33
416741	プレカット 22mm 肌色 フィルター付	33
416742	プレカット 25mm 透明 フィルター付	33
416743	プレカット 25mm 肌色 フィルター付	33
416744	プレカット 28mm 透明 フィルター付	33
416745	プレカット 28mm 肌色 フィルター付	33
416746	プレカット 32mm 透明 フィルター付	33
416747	プレカット 32mm 肌色 フィルター付	33
416748	プレカット 35mm 透明 フィルター付	33
416749	プレカット 35mm 肌色 フィルター付	33
416750	プレカット 38mm 透明 フィルター付	33
416751	プレカット 38mm 肌色 フィルター付	33
416795	エスティーム シナジー® インビジクローズ® ドレインパウチ	48
416795	35mm 透明 フィルター付	48
416796	35mm 肌色 フィルター付	48
416798	48mm 透明 フィルター付	48
416799	48mm 肌色 フィルター付	48
416901	61mm 透明 フィルター付	48
416902	61mm 肌色 フィルター付	48
416975	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期	32
416975	カスタムカット 19-64mm 肌色 フィルター付	32
416976	カスタムカット 19-64mm 透明 フィルター付	32
420695	バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ	45
420695	45mm 透明 フィルター付	45
420696	57mm 透明 フィルター付	45
420697	70mm 透明 フィルター付	45
420791	ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤	58
420791	入数100個	58
420792	ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用	58
420792	入数5個	58
421020	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期	32
421020	プレカット 25mm 透明 フィルター付	32
421021	プレカット 28mm 透明 フィルター付	32
421022	プレカット 32mm 透明 フィルター付	32
421023	プレカット 35mm 透明 フィルター付	32
421024	プレカット 38mm 透明 フィルター付	32
421025	プレカット 25mm 肌色 フィルター付	32
421026	プレカット 28mm 肌色 フィルター付	32
421027	プレカット 32mm 肌色 フィルター付	32
421028	プレカット 35mm 肌色 フィルター付	32
421029	プレカット 38mm 肌色 フィルター付	32
421030	バリケア® ナチュラ™ Mフランチ アコーディオン®	38
421031	モルダブル 57mmAS 13-22mm	38
421031	モルダブル 57mmAM 22-33mm	38
421032	モルダブル 70mmAL 33-45mm	38
421036	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランチ アコーディオン®	38
421037	モルダブル 57mmAS 13-22mm	38
421037	モルダブル 57mmAM 22-33mm	38
421038	モルダブル 70mmAL 33-45mm	38
421453	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランチ アコーディオン®	38
421453	カスタムカット 45mm 13-21mm	38
421455	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランチ アコーディオン®	38
421455	カスタムカット 45mm 13-21mm	38
421457	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランチ アコーディオン®	38
421457	カスタムカット 57mm 13-33mm	38
421459	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランチ アコーディオン®	38
421459	カスタムカット 57mm 13-33mm	38
421461	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランチ アコーディオン®	38
421461	カスタムカット 70mm 13-45mm	38
421463	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランチ アコーディオン®	38
421463	カスタムカット 70mm 13-45mm	38
421615	エスティーム™ やわらか凸(消化管用)	28
421615	カスタムカット 20-40mm L 肌色 フィルター付	28
421617	プレカット 30mm L 肌色 フィルター付	28
421618	プレカット 35mm L 肌色 フィルター付	28
421619	カスタムカット 20-30mm M 肌色 フィルター付	28
421621	プレカット 30mm M 肌色 フィルター付	28
421623	エスティーム™ やわらか凸 ウロ(尿路用)	30
421623	カスタムカット 10-40mm L 肌色	30
421625	プレカット 20mm L 肌色	30
421626	カスタムカット 10-30mm M 肌色	30
421628	カスタムカット 10-18mm S 肌色	30
421631	エスティーム™ ウロ 長期(尿路用)	34
421631	カスタムカット 13-45mm 透明	34

索引(注文番号順) 421632 - VB01

注文番号	品名	ページ
421632	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジアコーデオ® カスタムカット 45mm 13-22mm	39
421633	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジアコーデオ® カスタムカット 45mm 13-22mm	39
421634	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジアコーデオ® カスタムカット 57mm 13-35mm	39
421635	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジアコーデオ® カスタムカット 57mm 13-35mm	39
421636	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジアコーデオ® カスタムカット 70mm 13-48mm	39
421637	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジアコーデオ® カスタムカット 70mm 13-48mm	39
421680	ナチュラ™ プラス クローズパウチ	45mm 肌色 フィルター付 45
421681		45mm 肌色 45
421682		57mm 肌色 フィルター付 45
421683		57mm 肌色 45
421796	ナチュラ™ プラス クローズパウチ コンパクト	45mm 肌色 フィルター付 45
421797		57mm 肌色 フィルター付 45
421816	エスティーム™ クローズパウチ(コンパクト)	カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付 34
421934	やわらか平面 イレオ	カスタムカット 20-60mm 肌色 フィルター付 29
421935	やわらか凸 イレオ	カスタムカット 15-40mm L 肌色 フィルター付 29
421936		カスタムカット 15-30mm M 肌色 フィルター付 29
421937		カスタムカット 15-20mm S 肌色 フィルター付 29
422159	エスティーム™ やわらか凸(消化管用)	カスタムカット 20-55mm XL 肌色 フィルター付 28
422363	エスティーム™ やわらか凸 シャロー(消化管用)	カスタムカット 20-47mm L 肌色 フィルター付 28
422364		カスタムカット 15-40mm M 肌色 フィルター付 28
422365		カスタムカット 10-28mm S 肌色 フィルター付 28
422542		プレカット 40mm L 肌色 フィルター付 28
422543		プレカット 45mm L 肌色 フィルター付 28
422545		プレカット 25mm M 肌色 フィルター付 28
422546		プレカット 30mm M 肌色 フィルター付 28
422547		プレカット 35mm M 肌色 フィルター付 28
422551	エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ(尿路用)	カスタムカット 20-47mm L 肌色 30
422560		プレカット 30mm M 肌色 30
422561		プレカット 35mm M 肌色 30
422563		プレカット 15mm S 肌色 30
422564		プレカット 20mm S 肌色 30
422565		プレカット 25mm S 肌色 30
423281	エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイブ	入数30枚 58
423282	エセンタ™ 皮膚被膜剤 ワイブ	入数30枚 58
423288	エセンタ™ 皮膚被膜剤 スプレー	50mL 入数1本 58
423289	エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレー	50mL 入数1本 58
423511	やわらか凸 シャロー イレオ	カスタムカット 20-47mm L 肌色 フィルター付 29
423512		カスタムカット 15-40mm M 肌色 フィルター付 29
423513		カスタムカット 10-28mm S 肌色 フィルター付 29
423514		プレカット 40mm L 肌色 フィルター付 29
423515		プレカット 45mm L 肌色 フィルター付 29
423516		プレカット 25mm M 肌色 フィルター付 29
423517		プレカット 30mm M 肌色 フィルター付 29
423518		プレカット 35mm M 肌色 フィルター付 29

注文番号	品名	ページ
423646	エスティーム ボディ™ (消化管用) 3.5mm	プレカット 25mm 窓付 26
423647		プレカット 30mm 窓付 26
423648		プレカット 35mm 窓付 26
423651		カスタムカット 10-55mm 透明 26
423652		カスタムカット 10-45mm 透明 26
423653		カスタムカット 10-35mm 透明 26
423654		カスタムカット 10-25mm 透明 26
423659		7mm プレカット 25mm 窓付 26
423660		プレカット 30mm 窓付 26
423661		プレカット 35mm 窓付 26
423664		カスタムカット 10-55mm 透明 26
423665		カスタムカット 10-45mm 透明 26
423666		カスタムカット 10-35mm 透明 26
423667		カスタムカット 10-25mm 透明 26
423706	エスティーム ボディ™ ウロ(尿路用) 3.5mm	プレカット 15mm 窓付 27
423707		プレカット 20mm 窓付 27
423708		プレカット 25mm 窓付 27
423709		プレカット 30mm 窓付 27
423710		プレカット 35mm 窓付 27
423712		カスタムカット 10-45mm 透明 27
423713		カスタムカット 10-35mm 透明 27
423714		カスタムカット 10-25mm 透明 27
423725		7mm カスタムカット 10-45mm 透明 27
423726		カスタムカット 10-35mm 透明 27
423727		カスタムカット 10-25mm 透明 27
AC1010	バリケア® ウェハー	10×10cm 59
AC2005		20×20cm 59
ADC1905	アクティブライフ® ドレインパウチ CD	プレカット 19mm 透明 35
ADC2205		プレカット 22mm 透明 35
ADC2505		プレカット 25mm 透明 35
ADC2805		プレカット 28mm 透明 35
ADC3205		プレカット 32mm 透明 35
ADC3505		プレカット 35mm 透明 35
ADC3805		プレカット 38mm 透明 35
ADC4505		プレカット 45mm 透明 35
ADC5005		プレカット 50mm 透明 35
ADD6410	アクティブライフ® ドレインパウチ DX	カスタムカット 19-64mm 透明 35
APS7010	アクティブライフ® 術後パウチ S	カスタムカット 19-70mm 透明 35
AUC1305	アクティブライフ® ユリナパウチ CD(尿路用)	プレカット 13mm 透明 36
AUC1605		プレカット 16mm 透明 36
AUC1905		プレカット 19mm 透明 36
AUC2205		プレカット 22mm 透明 36
AUC2505		プレカット 25mm 透明 36
AUC2805		プレカット 28mm 透明 36
AUC3205		プレカット 32mm 透明 36
AUC3505		プレカット 35mm 透明 36
AUP4510	アクティブライフ® ユリナパウチ(尿路用)	カスタムカット 19-45mm 透明 36
IC01	バリケア® 洗腸用ストーマコーン	入数1個 63
IL10	バリケア® 洗腸スリーブ用クリップ	入数10本 63
PA60	バリケア® ペースト	56.7g 59
PDP5015	バリケア® ワンピース ドレインパウチ 小児用	カスタムカット 50mmまで 透明 50
PUP2515	バリケア® ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用)	カスタムカット 25mmまで 透明 50
PW30	バリケア® パウダー	28.3g 59
SI01	バリケア® 新洗腸器 ストーマコーン付	1セット 63
VB01	バリケア® ベルト	55-106cm 61