

前向きな気持ちで  
踏みだす、そばに。



## nioff

ニオフ消臭潤滑剤

人への“想い”を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(ニオフ)」から生まれた消臭潤滑剤です。ニオイの気ばかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭・潤滑実感でお応えします。



### ✓ 消臭と潤滑、確かなWの実感

nioff独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭。高い潤滑作用で処理もスルッとスムーズです。  
○抗菌成分(銅)で大腸菌の繁殖を抑制する抗菌性を持ち、菌から出るニオイを抑制します。

### ✓ 安全性へのこだわり

高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うものだから各種の安全性試験をクリアしています。  
○ノンアルコール ○パラベンフリー ○無着色 素材自体(銅イオン)の青色

### ✓ ソフトな容器で押しやすく、入れやすい

容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。中身が見えるので残量が確認しやすく、1回分の使用量の目安になるメモリ付きです。



ボトル



ミニパック

nioff(ニオフ)消臭潤滑剤 内容成分：銅系消臭成分、潤滑成分、精製水、界面活性剤

	注文番号	規格	包装単位	本体価格	税込価格
ボトル	05016	250mL	1本	2,600円	2,860円
ミニパック	05017	8mL	10袋/箱	1,230円	1,353円


※使用により、便の色が黒くなる場合があります。

nioff消臭潤滑剤

優れた消臭のメカニズム

## パナソニック独自の「リコンビネーション消臭」

ニオイを香りでごまかすのではなく、銅イオンがニオイ分子に働きかけ、構造そのものを組み換えて消臭します。これがパナソニック独自の「リコンビネーション消臭」です。ニオイ分子自体が組み換わるため消えたニオイは戻りません。

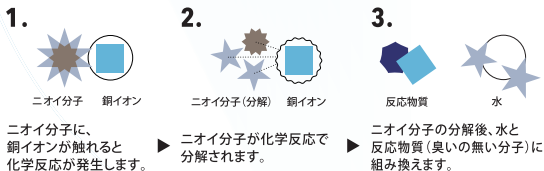

nioffシリーズを貫く

安全設計

## 安全性に徹底してこだわっています

素材のすべてを、肌にやさしい材料のみで構成しました。確かな「安心」をめざして、外部機関による安全性確認試験も重ねました。

- AMES試験(復帰突然変異試験)
- 急性経口毒性試験
- 皮膚刺激性試験
- 眼刺激性試験
- 皮膚感作性試験


(試験機関:(株)薬物安全性試験センター)



### 使い方


#### 1. ストーマ袋交換時

ストーマ袋にあらかじめ約8mL(大さじ半分程度)を投入し、よくなじませてから装着する。

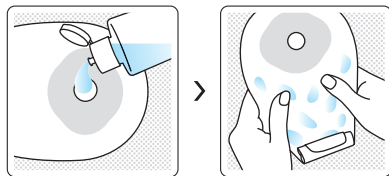

#### 2. ストーマ袋装着中

装着中に排泄物を処理した際には、もう一度約8mL(大さじ半分程度)投入し、よくなじませる。

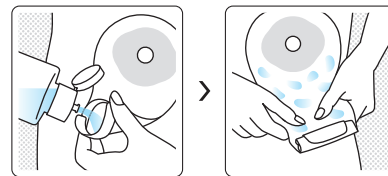

※使用により、便の色が黒くなる場合があります。

ブーケ(若い女性オストメイトの会)アンケートより  
**オストメイトの皆さまから  
多くの支持をいただいています。**

「nioff消臭潤滑剤」の開発にあたり、ブーケの皆さまにご協力をいただきました。パナソニック エコソリューションズ化研はブーケを応援しています。

排泄処理の時のトイレにこもるニオイに困っている。これは、パウチからも嫌なニオイがなくて良かった😊

色がさわやかで良いと思った😊

ニオイがかなり軽減されるので不快感や衣類へのニオイ移りが無く、かなり安心😊

香りをかぶせるのではなく、ニオイ自体を消す消臭効果が強かった😊

フタの開閉がストレスなくできたこと。押し出す際もスムーズにできたこと😊

潤滑剤としてとてもスムーズで良かったです😊

製造元

パナソニック化研株式会社

〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜4丁目1番20号

 nioff

人と人をやさしさでつなぐ消臭剤

ニオフブランドサイト

<http://panasonic.co.jp/es/pesacr/>

販売元

コンバテック ジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

お客様相談窓口 ☎ 0120-532384

無料サンプルのご用命はこちらまで

お求めは各販売店様へお問い合わせください