

Esteem Body™ výpustný

- K dispozici v průhledném i neprůhledném provedení s okénkem
 - Vystřihovatelný
 - Hloubka konvexity 3,5 mm a 7 mm
- Velikost standard a velký
 - Diskrétní teplá šedá barva
 - Hmota Durahesive®

SÚKLkód	Název	Doplňěk
5016792	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016793	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016794	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016806	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V0/10–55 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016807	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016808	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016809	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016795	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016796	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016797	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10–25 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016810	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V0/10–55 mm, průhledný, velký, 10 ks
5016811	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, průhledný, velký, 10 ks
5016812	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, průhledný, velký, 10 ks
5016813	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10–25 mm, průhledný, velký, 10 ks
5016798	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10–55 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016799	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016800	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016801	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016814	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10–55 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016815	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016816	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016817	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks
5016802	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10–55 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016803	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016804	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016805	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016818	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10–55 mm, průhledný, velký, 10 ks
5016819	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, průhledný, velký, 10 ks
5016820	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, průhledný, velký, 10 ks
5016821	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, průhledný, velký, 10 ks



Esteem Body™ urostomický

- K dispozici v průhledném i neprůhledném provedení s okénkem
 - Vystřihovatelný
- Hloubka konvexity 3,5 mm a 7 mm
 - Velikost standard
 - Diskrétní teplá šedá barva
- Hmota Durahesive®
 - Měkká výpust Soft tap

SÚKLkód	Název	Doplňěk
5016822	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016823	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016824	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016825	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016826	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016827	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V3/10–25 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016828	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016829	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016830	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks
5016831	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016832	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, průhledný, standard, 10 ks
5016833	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, průhledný, standard, 10 ks



convatec.cz



@stomikradim_convatec



@convatecceskarepublika



www.facebook.com/stomikradimconvatec




Problém
s podtékáním?
Vyřešeno.



!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Produkty zmíněné v tomto materiálu patří mezi zdravotnické prostředky, čtěte pozorně příbalové letáky.



Naše adheziva jsou ověřena mnoha lety používání a jsou vyvinuta tak, aby se na ně stomici vždy mohli spolehnout.

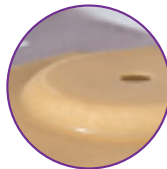

Díky kombinaci hloubky a šířky konvexity se sáčky Esteem Body™ přizpůsobí tělesným křivkám a typu stomie.



Moderní vzhled sáčku ve tvaru osmičky zajišťuje jeho menší prověšování během naplňování. *

Představujeme vám pomůcku
EsteemBody™
s technologií Leak Defense™ – ochranou před podtékáním

Seznamte se s naší novou řadou měkkých konvexních pomůcek s ochranou před podtékáním. Díky kombinaci našich adheziv, které patří ke zlatému standardu, a širokého výběru konvexity, se Esteem Body™ přizpůsobí křivkám těla i stomie a zajistí tak dlouhotrvající a bezpečné přilnutí.



Stomalinka®
convatec
800 122 111

EsteemBody™

s ochranou před podtékáním

- 1

Naše adheziva, která představují zlatý standard, bezpečně chrání pokožku kolem stomie.
- +
- 2

Kombinace hloubky a šířky konvexity zajišťuje bezpečné přilnutí hned od začátku.

Adheziva

Vyvinuli jsme je tak, aby zabránila iritaci pokožky ještě před tím, než vznikne

Vývojem hydrokoloidů Convatec způsobil revoluci v oblasti stomické péče. Naše adheziva, která představují zlatý standard, zabezpečují ochranu peristomální pokožky a byla vyvinuta tak, aby zajišťovala dlouhotrvající přilnutí.



Pomůcky Esteem Body™ jsou vyrobeny z hmoty Durahesive® a modifikované hmoty Stomahesive®

Tekutá stolice či moč?

Vyzkoušejte hmotu Durahesive®. Tento typ je určen pro stomiky s převážně tekutou stolicí či močí. Hmotu po zvlhčení nabobtná, vytvoří tzv. roláček a stomii bezpečně utěsní.



Částečně formovaná nebo formovaná stolice?


Vyzkoušejte modifikovanou hmotu Stomahesive®. Ideální pro stomiky s částečně formovanou nebo formovanou stolicí. Hmotu dokonale přilne k suché i vlhké pokožce a obsahuje stopu minerálního oleje, díky kterému je podložka pružnější a snáze se odstraňuje.

Konvexní pomůcky

Měkké konvexní pomůcky v mnoha variantách

Esteem Body™ nabízí celou řadu konvexních variant, aby se co nejlépe přizpůsobil různým anatomickým poměrům a typům stomie. Znalost 5 klíčových charakteristik konvexity umožňuje zdravotníkům zvolit optimální konvexní podložku, která bude konkrétnímu stomikovi nejvíce vyhovovat.

5 Pět charakteristik konvexity¹

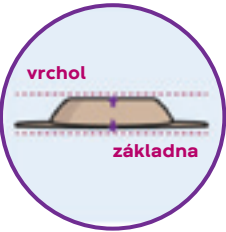


Hloubka
Hloubka konvexní podložky je definována jako vzdálenost od spodní části podložky k jejímu vrcholu.



Stlačitelnost
Stlačitelnost je schopnost posunu nebo zploštění vrcholu konvexní podložky.





Flexibilita
Flexibilita je snadnost ohnutí konvexní podložky.

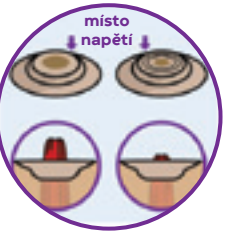

Místo napětí
Místo napětí je místo, ve které konvexní část působí silou směrem dolů a ven na peristomální topografii.




Sklon
Sklon je úhel mezi spodní částí podložky a jejím vrcholem.

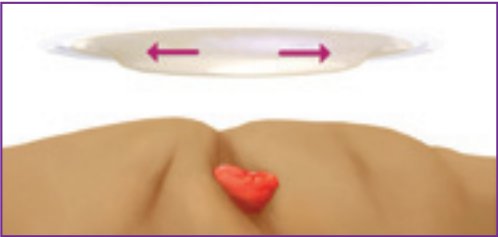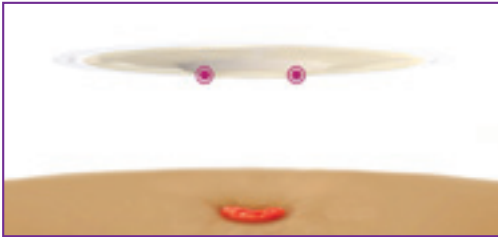

Hloubka a místo napětí umožňují stomickým konvexním pomůckám, aby stomie vystoupila a aby se vyrovnaly kožní nerovnosti.

Pokud potřebujeme, aby stomie vystoupila, použijeme pomůcku se středovým místem napětí. To znamená s nejužší možnou konvexitou.

Pokud potřebujeme vyrovnat záhyby, použijeme pomůcku s periferním místem napětí. V praxi to znamená, že použijeme širší konvexitu.

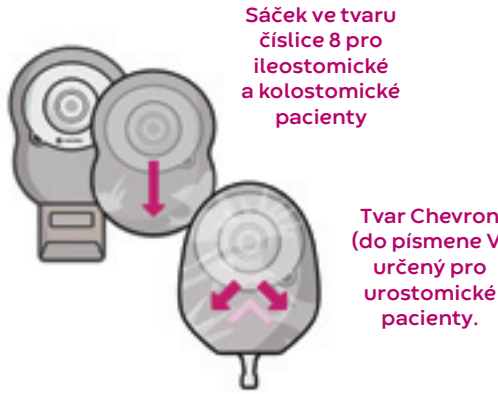

Sáček ve tvaru číslice 8 pro ileostomické a kolostomické pacienty

Tvar Chevron (do písmene V) určený pro urostomické pacienty.

Design sáčku

Moderní sáček navržený pro vaše pacienty

- ✓ Moderní vzhled sáčku ve tvaru osmičky zajišťuje jeho menší prověšování během naplňování.*
- ✓ Tvar Chevron určený pro urostomické pacienty.
- ✓ Vizuálně diskrétní provedení.
- ✓ Látky skrývá obsah sáčku, dokonce i po navlhčení sáčku.
- ✓ Tkanina sáčku je vodoodpudivá.

Esteem Body™ uzavřený

- K dispozici průhledný i šedý s okénkem
- Vystřihovatelný
- Hloubka konvexity 3,5 mm a 7 mm
- Velikost standard a velký
- Diskrétní teplá šedá barva
- Modifikovaná hmota Stomahesive®

SÚKLkód	Název	Doplňk
5016771	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V0/10–55 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks
5016772	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks
5016773	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks
5016778	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V0/10–55 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016779	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016780	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016781	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016782	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V0/10–55 mm, průhledný, velký, 30 ks
5016783	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V1/10–45 mm, průhledný, velký, 30 ks
5016784	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V2/10–35 mm, průhledný, velký, 30 ks
5016774	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V0/10–55 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks
5016775	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks
5016776	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks
5016777	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks
5016785	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V0/10–55 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016786	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016787	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016788	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V3/10–25 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks
5016789	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V0/10–55 mm, průhledný, velký, 30 ks
5016790	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V1/10–45 mm, průhledný, velký, 30 ks
5016791	Sáček 1D Esteem Body Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V2/10–35 mm, průhledný, velký, 30 ks



* Sáčky ve tvaru číslice 8 jsou k dispozici v uzavřené a výpustné variantě.

1. McNichol L, Cobb T, Depaifve Y, Quigley M, Smitka K, Gray, M. Characteristics of Convex Skin Barriers and Clinical Application: Results of an International Consensus Panel. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2021; 48(6): 524–532.