

# Zdravá pokožka v okolí stómie je u nás na prvom mieste

- Adhezívna hmota na našich stomických pomôckach je našim dedičstvom
- Zdravie pokožky v okolí stómie je pre nás v starostlivosti o stómiu veľmi dôležité
- To, že sa zameriavame hlavne na adhezívnu hmotu, nám poskytuje príležitosť pozitívne ovplyvniť celé naše produktové portfólio
- V súčasnosti obraciame našu pozornosť práve na našu adhezívnu hmotu

## Hydrokoloidné adhezívne hmoty pomáhajú udržiavať peristomálnu kožu zdravú.

### Ako fungujú hydrokoloidné adhezívne hmoty?


- Hydrokoloidné adhezíva sú navrhnuté tak, aby vytvorili bezpečné spojenie a zároveň chránili pokožku.
- Technológia hydrokoloidného adhezíva, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Convatec pred viac ako 40 rokmi, bola všeobecne prijatá ako štandard starostlivosti o stómiu.

- Vo viacerých medzinárodných štúdiách zdravotníci uvádzajú, že zdravie peristomálnej pokožky je to najdôležitejšie, o čo sa zaujímajú.<sup>2,3</sup>
- 65 % zdravotníkov v USA dokonca hovorí, že adhezívna hmota rozhoduje pri výbere stomického systému, ktorý odporučia.<sup>2</sup>

## Aké sú 2 dôležité správy od nás pre vás?

1. Dôverujte adhezívnej hmote od spoločnosti Convatec.
2. Adhezívne hmoty od spoločnosti Convatec poskytujú veľa možností, ktoré pomôžu vybrať ten správny produkt pre každého človeka so stómiou.


„Až 75 % stomikov hlási kožné komplikácie“<sup>1</sup>

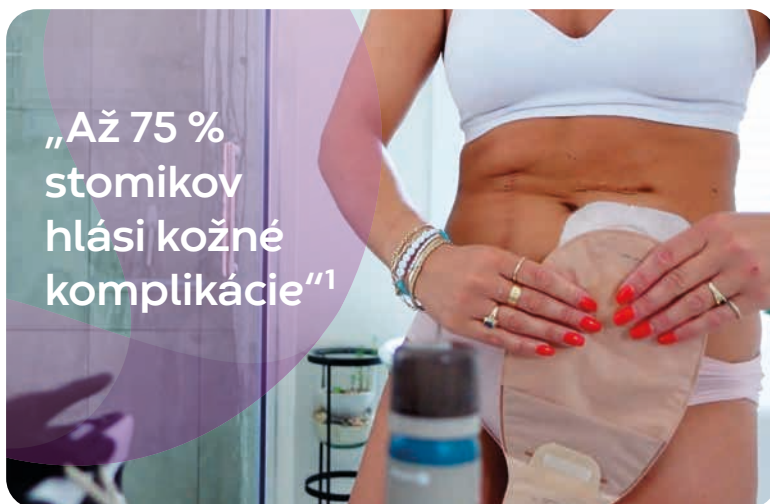

#### Referencie:


1. Lessons Learned About Peristomal Skin Complications: Secondary Analysis of the ADVOCATE Trial. Salvadalena, Ginger; Colwell, Janice C.; Skountrianos, George; Pittman, Joyce.  
2. Please rank, in descending order, the importance of the following adhesive attributes. Q11 - Which item below most heavily influences your decision when choosing an ostomy product? IQVIA | ConvaTec | Global Adhesives survey | Country report | September 2021 (COMPASS: RM-61460) 3. Q10. Below is a list of different attributes which could contribute to satisfaction in use of ostomy brands. Please rate each aspect on how important it is to you personally using a scale from 1 to 5, with 5 being "extremely important" and 1 being "not at all important." Base: Aware of brand. Global Nurses: Esteem+ (n=237). Natura (n=216). Natura+ (n=182). Sensura (n=227). Sensura Mio (n=217). (COMPASS: RM-61460) (COMPASS RM-61459)

## Radikálne zmeňte svoju rutinu

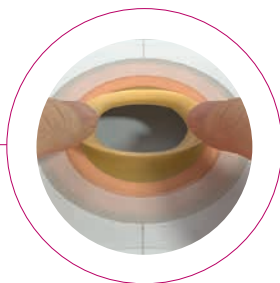


### Krok 1:

Pomocou palcov zhrňte okraje otvoru dozadu a potom opatrne umiestnite podložku na stómiu.

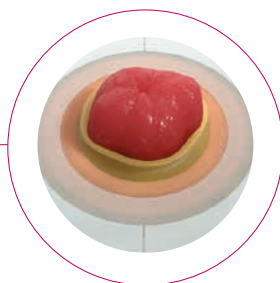

### Krok 2:

Tvarovateľný materiál sa zľahka vráti do pôvodného stavu a tesne obopne stómiu.

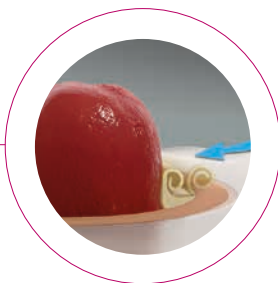

### Krok 3:

Tvarovateľný spájací materiál sa mierne roztáhuje a sťahuje spolu so stómiou, aby sa tak počas dňa prispôbil zmenám jej veľkosti.



### Krok 4:

Vrstva podložky je schopná absorbovať vlhkosť, čo spôsobí jej mierne zdurenie okolo stómie, ktoré zabezpečí, že k nej pevne prilne. Vytvorí sa tak „korytnačí“ golier, ktorý poskytuje ešte efektívnejšiu ochranu pred presiaknutím.

### Vedeli ste?

Podložky s Convatec tvarovateľnou technológiou™ sú navrhnuté tak, aby ich otvor tesne obopol stómiu, aby lepšie a bezpečnejšie sedeli.

**95 % ľudí, ktorí začali používať Convatec tvarovateľnú technológiu™ hneď po operácii, si zachovalo zdravú peristomálnu pokožku<sup>2</sup>.**

Convatec tvarovateľná technológia™ je dostupná v našich adhezívach Stomahesive™ a DuraHesive™.

### Vyberte ten správny produkt pre stómiu

#### Každá stómia je jedinečná!

My v spoločnosti Convatec chápeme, že každý stomik je jedinečný. To je dôvod, prečo sme vytvorili adhezívne hmoty tak, aby vyhovovali každému veku, typu tela, umiestneniu alebo tvaru stómie. Takže stomici vždy získajú zdravé puto, ktorému môžu dôverovať.

- Dôverujte bohatej histórii spoločnosti Convatec v technológii hydrokoloidných adhezívnych hmôt.

- Spoločnosť Convatec je zlatým štandardom v oblasti hydrokoloidov.
- Náš vynález technológie hydrokoloidného adhezíva spôsobil revolúciu v štandardoch starostlivosti o stómiu.
- Adhezíva Convatec vytvárajú zdravé putá tým, že chránia peristomálnu pokožku.

Aby sme vyhověli jedinečným potrebám každého stomika, ponúkame rôzne stomické systémy. Bez ohľadu na obavy. So 40-ročnými skúsenosťami môžete spoločnosti Convatec dôverovať, že vie, čo stomici potrebujú.

Chápeme, čo vytvára zdravé putá. Poskytujeme nástroje potrebné na prevenciu a liečbu problémov u stomikov.

**Vieme, že nie je každá stómia rovnaká. Vieme tiež, že vaša stómia a vaše telo sa môžu zmeniť.**

## Adhezívne hmoty Convatec sa dodávajú v troch typoch:

1. Stomahesive™
2. Durahesive™
3. Esteem™+ Flex Convex

# Hmota Stomahesive™ na štandardnú dobu nosenia



## Stomahesive™

Pre ľudí, ktorých stolica je tuhá, odporúčame podložku Stomahesive, ktorá je určená na štandardnú dobu nosenia:

- poskytuje spoľahlivú ochranu pokožky;
- priľne na suchú aj na vlhkú pokožku;
- je príjemná na pokožke a je šetrná ku koži pri odstraňovaní.

### Jednodielný systém

Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Modifikovaná Stomahesive™ technológia Stomahesive™ technológia	plochá	tvarovateľný vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Esteem™+ jednodielný systém  Esteem™ jednodielný systém

### Pre tuhú stolicu

- poskytuje spoľahlivú ochranu pokožky
- priľne na suchú aj na vlhkú pokožku
- je šetrná ku koži pri jej odstraňovaní

### Dvojdielný systém

Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Stomahesive™ technológia	plochá	tvarovateľný vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja Natura™ podložka s harmonikovým krúžkom výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Natura™ podložky dvojdielný systém



# Hmota Durahesive™ na dlhšiu dobu nosenia



## Durahesive™

Pre ľudí, ktorých stolica je väčšinou tekutá alebo ak ide o moč, odporúčame podložku Durahesive s predĺženou dobou nosenia.

Je navrhnutá tak, aby:

- bola vysoko trvanlivá a odolná voči tekutej stolici
- mala zvýšenú adhezivitu
- jemne napučala pri kontakte s tekutinou pre lepšie utesnenie bez poškodenia pokožky

Jednodielný systém				
Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Durahesive™ technológia a Durahesive™ + technológia	plochá konvexná	vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja  výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Esteem™ + jednodielný systém

Dvojdielný systém				
Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Durahesive™ technológia	plochá konvexná	tvarovateľný vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja Natura™ podložka s harmonikovým krúžkom  výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Natura® podložka s tvarovateľným otvorom

## Väčšinou pre tekutú stolicu alebo moč

- vysoko odolná voči tekutému obsahu zo stómie
- silnejšie adhezívum
- pri kontakte s tekutinou mierne napučí, aby sa zlepšilo utesnenie bez poškodenia pokožky





# Hmota na produkte Esteem™ + Flex Convex na zníženie podtekania



## Esteem™ + Flex Convex

Pre ľudí, ktorých stolica je tuhá alebo väčšinou tekutá, alebo pre moč.

Pre tých, ktorí potrebujú všetko v jednom - podložku a vrečko ako celok.

Zvýšená flexibilita podložky umožňuje flexibilnejšie prispôsobenie sa kontúram tela pri pohybe, a tým sa zvyšuje komfort pri jej nosení.

- Prispôsobí sa telu a zlepšuje utesnenie, aby sa minimalizovalo podtekание.
- Má vysokú počiatočnú lepivosť, ktorá pomáha priľnúť k pokožke.
- Poskytuje pocit väčšieho pohodlia pri nosení.

Jednodielný systém				
Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Esteem™ + Flex convex technológia	konvexná	vystrihovateľný predstrihnutý	s a bez flexibilného okraja  výpustné, uzavreté a urostomické vrečky	Esteem™ + jednodielný systém

## Pre tuhú aj tekutú stolicu a moč

- zlepšuje utesnenie s minimalizáciou podtekania
- vysoká počiatočná lepivosť pomáha priľnúť k pokožke
- zvýšená flexibilita umožňuje lepšie sa prispôbiť pohybom tela

# „Zdravé puto je to, ktorému dôverujete“

## Pamätajte si:

- Adhezívne hmoty spoločnosti Convatec sú založené na dôvere.
- Dôverujte spoločnosti Convatec, že sa vám podarí hneď na prvýkrát vybrať ten správny stomický systém.
- Verte, že stomici budú mať vďaka našim stomickým produktom pocit istoty a bezpečia a budú chránení.
- Dôverujte produktu z hľadiska prispôsobenia, veľkosti a ochrany proti podtekaniu.
- Pretože dôvera je to, čo získate od inovátora v oblasti hydrokoloidov a inovátora v starostlivosti o stómiu už viac ako 40 rokov.
- Dôvera je to, čo vytvára zdravé putá medzi stomikmi, zdravotníkmi a stomickými produktmi.