


NATURA™

Sistema Acordeón™ Recortable




Plano recortable


1. Aplicación base protectora Natura™ Acordeón™

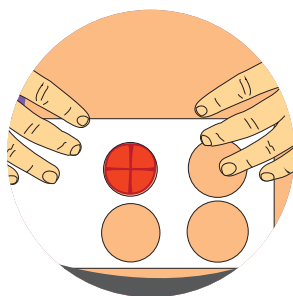


Mida el estoma y seleccione la medida adecuada para la base protectora.

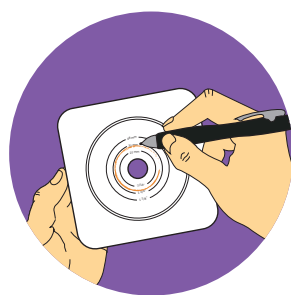

Dibuje la medida del estoma en el centro del delineador de la parte trasera de la barrera protectora, luego corte la parte que queda fuera del dibujo.

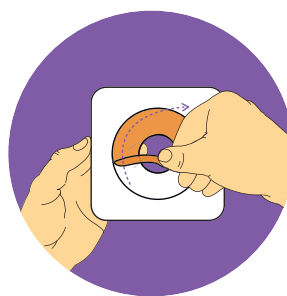


Despegue el film protector y centre la apertura alrededor del estoma. Aplíquelo sobre la piel limpia y seca.

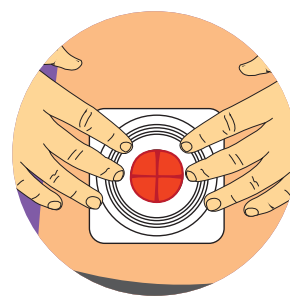


Remueva el papel protector y aplique sobre la piel asegurándose de alisar la cinta adhesiva, mantenga sus dedos en la base protectora en el sitio durante unos 30 segundos.


2. Aplicar la bolsa

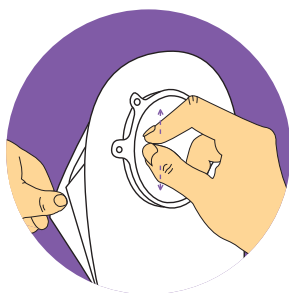

Separe los lados de la bolsa y deje entrar un poco de aire.

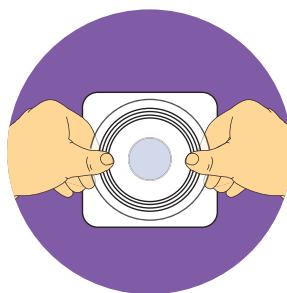


LEVANTE el sistema Acordeón™ y sujete con los pulgares arriba y los otros dedos abajo. Alinee el aro de conexión con la base protectora.

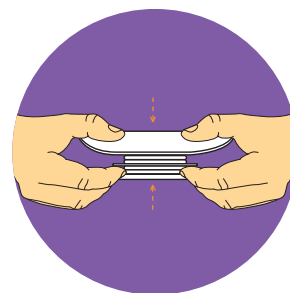


Comience desde abajo y aplique presión alrededor de los aros de conexión hasta que queden encajados. Después coloque el Sistema Acordeón™ en posición hacia **ABAJO** para conseguir un perfil plano.


3. Cerrar la bolsa

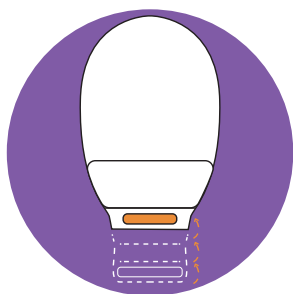

Pliegue la cola de la bolsa hacia usted hasta que el cierre encaje.

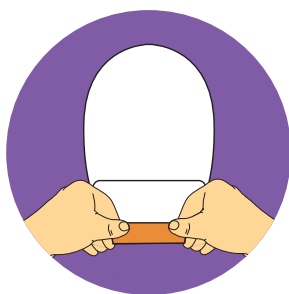


Presione alrededor del cierre para asegurarla.

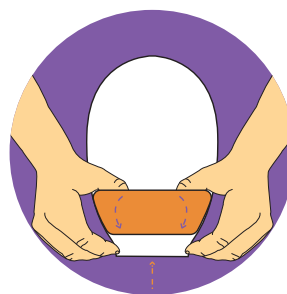


Cire el bolsillo hacia fuera para que quede el cierre dentro del panel de confort.


4. Vaciar y limpiar la bolsa

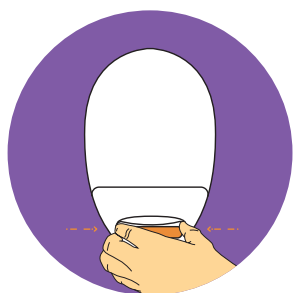

Para vaciar la bolsa, incline la cola hacia arriba hacia su cuerpo. Abra el panel de confort y deshaga los pliegues. Desbloquee el cierre de la bolsa y abra presionando los dos extremos de la salida con sus dedos para drenar la bolsa.

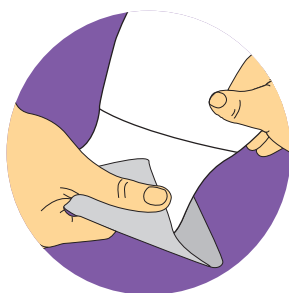

Trucos para limpiar la bolsa:
Aguante la bolsa con una mano y limpie la cola haciendo movimientos hacia abajo con papel higiénico y con la otra mano.

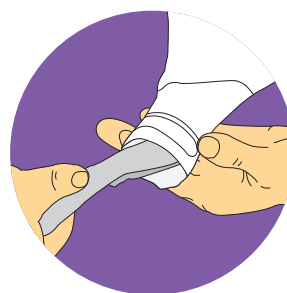


Limpie la superficie interior de la cola con papel higiénico o una toallita húmeda.

5. Quitar la bolsa



Para retirar la bolsa del sistema de ostomía, sujete la base protectora sobre su piel con una mano y cuidadosamente con la otra tire hacia abajo para desacoplar la bolsa.

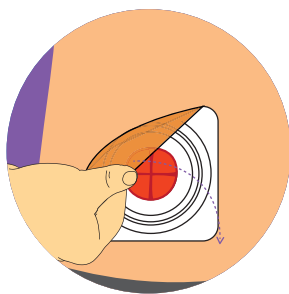

Cuidadosamente retire la base protectora de la piel, mientras sujeta la parte de la piel donde está adherida con la otra mano.

Para más información contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

InfoTec
(93 602 37 37)
infotec@convatec.com

Por favor consulte el folleto en el interior para información completa sobre las instrucciones de uso.