



DĚTSKÉ STOMICKÉ POMŮCKY

Přehled stomických pomůcek
a příslušenství

PODLOŽKY A SÁČKY

ConvaTec Little Ones™ je profesionální řadou dětských pomůcek, která byla vytvořena špičkovými odborníky z oblasti dětské chirurgie specializované na stomii.

- Jsou navrženy tak, aby se dokonale přizpůsobily i tomu nejmenšímu dětskému břichu.
- Speciální materiály zajišťují bezpečně přilnutí pomůcky na kůži.
- Díky měkce svařovaným koncům jednotlivých sáčků poskytují výjimečné pohodlí pro každé dítě.

Dětský stomický systém s adhezí technologie Esteem synergy®

PODLOŽKA

SÚKL kód 5006725, 5 ks v balení, číselný kód kategorie 03.05.02.01

SÁČEK

SÚKL kód 5006729, 10 ks v balení, číselný kód kategorie 03.05.02.03

Speciální samolepicí technologie umožňuje výměnu sáčku bez sejmutí podložky z břicha dítěte. Usnadňuje výměnu sáčku a navíc je šetrnější k dětské pokožce.

- Stomii si můžete prohlédnout bez nutnosti odstraňovat podložku.
- Flexibilní podložka je velmi ohebná a dobře se přizpůsobí tvaru dětského břicha.
- Moderní filtrační systém zajistí odchod plynů a tím nedochází k nafukování sáčku.
- Zakulacený tvar sáčku a jeho měkké lemy umožní dítěti sáček pohodlně nosit.
- Výpustné sáčky InvisiClose® usnadňují vyprazdňování sáčku a zabezpečují těsnost díky dvojitému uzávěru.



Little Ones™



Dětský jednodílný stomický systém Esteem® InvisiClose®

SÁČEK

SÚKL kód 5006731, 10 ks v balení, číselný kód kategorie 03.05.01.01

Díky unikátní přírodní hojivé hmotě Stomahesive® sáčky velmi dobře drží a jsou šetrné k dětské kůži.

- Výpust InvisiClose® poskytuje dvojité ochranné zabezpečení a umožňuje snadné vypouštění.
- Sáčky jsou na jedné straně průhledné, což umožňuje kontrolu stolice. Navíc jsou měkké a dětem tak poskytují dokonalé pohodlí.
- Možnost vystřížení otvoru o průměru 0–23 mm.



Sáčky dětské Stomadress®

Sáček výpustný

SÚKL kód 5006848, 15 ks v balení, číselný kód kategorie 03.05.01.01

- Výpustný sáček je celý průhledný.
- Výpust se uzavírá měkkým proužkem, který však zajistí bezpečné uzavření sáčku.
- Možnost vystřížení otvoru o průměru 8–50 mm.



Sáček urostomický

SÚKL kód 5006845, 15 ks v balení, číselný kód kategorie 03.05.01.03

- Je určen pro děti, kterým ze stomie odchází moč.
- Sáček je celý průhledný, takže lze dobře sledovat barvu i množství moči.
- Sáček je uzavřen plastovou výpustí.
- Drážďení pokožky zabraňuje chlopeč, která udržuje moč ve spodní části sáčku a brání jejímu návratu ke stomii.
- Možnost vystřížení otvoru o průměru 8–25 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pořadí pomůcek z řady příslušenství je pro lepší orientaci seřazeno tak, jak bychom je měli používat při výměně pomůcky.

Odstraňovače podložky

Odstraňovač podložky napomáhá k jednoduchému a pohodlnému sejmutí pomůcky z těla. Je velmi důležitý, protože slouží jako prevence poškození jemné kůže kolem stomie. Můžeme si vybrat mezi odstraňovačem v ubrouscích ConvaCare® nebo v ubrouscích a ve spreji Esenta™. Po použití těchto výrobků nesmíme zapomenout důkladně omýt kůži mýdlem bez olejových složek a vodou, aby nová pomůcka dobře držela.

Čistící pěny

Speciálně vyvinutá pěna StomFoam® je určená pro čištění kůže v okolí stomie. Snadno se aplikuje, při použití nestéká. Má neutrální pH a je zcela přírodní, bez barviv a konzervantů. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.

Adhezivní pasty a těsnicí manžety

V okolí stomie se mohou vyskytnout různé záhyby či prohlubně, které je třeba před nasazením pomůcky vyrovnat, aby nám pomůcka dobře držela a nepodtékala. Pasta vyrovnávací Stomahesive® 60 g navíc obsahuje alkohol, který pokožku dezinfikuje. Z tohoto důvodu se může stát, že po aplikaci pasty může dané místo asi 1 minutu mírně štípat.

Pastu aplikujte pomocí vodou namočeného prstu. Pasta se potom nelepí a dobře se s ní pracuje.

Tip

Těsnicí kroužek Stomahesive® je elastický, velice dobře se tvaruje a upravuje dle individuálních potřeb. Je možné ho trhat a použít jen část nebo opět spojit či vrstvit. Snadno se odstraňuje zároveň se stomickou pomůckou. Po odstranění nezanechává zbytky hmoty na kůži. Absorbuje tekutinu a jemně gelovatí. Neobsahuje alkohol.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Produkty zmíněné v této brožuře patří mezi zdravotnické prostředky, čtěte pozorně příbalové letáky.



Vyrovňovací pásky Varimate®

Abychom docílili co nejlepší přilnavosti pomůcky, doporučujeme používat Vyrovňovací pásky Varimate®. Brání odlepování stomické pomůcky. Jsou vyrobeny z přírodní hydrokoloidní hmoty, která nedráždí pokožku. Naopak jsou vhodné i na velmi citlivou pokožku. Přizpůsobí se našemu tělu a pohybu. Pásky jsou voděodolné, a proto dobře drží i při koupání.

Zásypové pudry, ochranné krémy a filmy

Pudr Stomahesive® má hojivé účinky a používá se na podrážděnou pokožku. Používá se ve velmi tenké vrstvě na čisté omytou a osušenou pokožku, zejména na rozbolavělé okolí stomie či při podráždění v důsledku vniknutí stolice pod pomůcku. Použití je jednoduché – lahvičku s pudrem držíme vodorovně, přibližně 7–10 cm od těla a zmáčkneme ji. Vytvoří se obláček, který pudr rovnoměrně rozptýlí na požadovaném místě. Před nalepením pomůcky jemně odstraníme přebytečný pudr pomocí buničité vaty či papírového ubrousku. Následně můžeme použít ochranný film.

Ochranný film doporučujeme používat vždy jako prevenci. Jednak na něm pomůcka lépe drží, a zároveň se na kůži vytvoří doslova film, který chrání kůži. I když dojde k podtečení pomůcky, pokožka není tak náchylná k podráždění, jako bez jeho použití. Můžeme si zvolit, zda budeme používat ochranný film v ubrouscích ConvaCare® nebo v ubrouscích či spreji Esenta™.



LIMITY STOMICKÝCH PODLOŽEK		LIMITY STOMICKÝCH SÁČKŮ
Kolostomie	měsíční limit = 10 ks	Výpustné a urostomické měsíční limit = 30 ks
Ileo a urostomie	měsíční limit = 15 ks	

V případě potřeby, po domluvě s lékařem, lze limit navýšit na dvojnásobek.

KÓD SÚKL	NÁZEV	DOPLNĚK	ÚHRADA ZDR. POJIŠŤOVNY
Odstraňovače stomické podložky – limit 300,15 Kč/měsíc kategorie: 03.08.04.01			
5006778	Odstraňovač podložky ConvaCare®	ubrousky, 100 ks	600,00 *
5014528	Odstraňovač podložky Esenta™ s nepálivým přípravkem	ubrousky, 30 ks	300,15
5014529	Odstraňovač podložky Esenta™ s nepálivým přípravkem	sprej, 50 ml	300,15
Čistící roztoky, čistící pěny, tělové čistící ubrousky – limit 300,15 Kč/měsíc kategorie: 03.09.02.01			
5014245	Čistící pěna StomFoam® Maxi	200 ml	300,15
5014244	Čistící pěna StomFoam® Mini	50 ml	156,06
Pásky vyrovnávací – limit 120 ks/měsíc kategorie: 03.08.01.02			
5014137	Vyrovnávací pásek Varimate® půlkruh	4 x 14 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno
5005989	Vyrovnávací pásek Varimate® čtvrtkruh	3 x 9 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5005990	Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar	3 x 11 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5005988	Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar	5 x 11 cm, hydrokoloidní, 30 ks	plně hrazeno
5005987	Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar	5 x 22 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno
Adhezivní pasty a gely – limit 1 ks/měsíc kategorie: 03.08.01.02			
5006795	Pasta vyplňovací Stomahesive®	30 g	plně hrazeno
5006803	Pasta vyrovnávací Stomahesive®	60 g	plně hrazeno
Těsnící manžety – limit 60 ks/měsíc kategorie: 03.08.01.05			
5006685	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, 10 ks	plně hrazeno
5006663	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, tenký, 10 ks	plně hrazeno
5006652	Těsnící kroužek Stomahesive®	98mm, 10 ks	plně hrazeno
Zásypové pudry, ochranné krémy a filmy, přídržné proužky – limit 1 050 Kč/měsíc kategorie: 03.09.01.01			
5006844	Film ochranný ConvaCare®	ubrousky, 100 ks	500,01
5006567	Film ochranný Silesse®	sprej, 50 ml	500,01
5006563	Film ochranný Silesse®	ubrousky, 30 ks	1 000,00
5006849	Pudr Stomahesive®	zásypový, 25 g	500,01
5014530	Ochranný film Esenta™ s nepálivým kožním filmem	ubrousky, 30 ks	1 000,50
5014531	Ochranný film Esenta™ s nepálivým kožním filmem	sprej, 50 ml	500,25
Destičky a roušky – limit: plná úhrada kategorie: 03.08.01.04			
5006851	Destička vyrovnávací Stomahesive®	10 x 10 cm, 5 ks	plně hrazeno
5006853	Destička vyrovnávací Stomahesive®	20 x 20 cm, 3 ks	plně hrazeno
Stomické pásky – přídržné – limit 2 ks/rok kategorie: 03.08.02.01			
5006860	Pásek	přídržný, 1 ks	plně hrazeno
Stomické břišní pásy – limit 2 ks/rok kategorie: 03.08.02.02			
5005629	Břišní podpurný pás STOMEX 2700	1 ks	600,30 **
Prostředky zahušťovací – limit 359,95 Kč/měsíc kategorie: 03.08.03.01			
5006635	Sáčky gelující Diamonds®	100 ks	1079,99 ***
Pohlčovače pachu – limit 367,84 Kč/měsíc kategorie: 03.08.05.01			
5002118	Pohlčovač pachu StomOdor® Spray Maxi	210 ml	180,00
5002119	Pohlčovač pachu StomOdor® Spray Mini	50 ml	139,01
5002120	Pohlčovač pachu StomOdor® Drops	35 ml	180,00

Úhrady a limity jsou včetně DPH, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, ** s doplatkem 340,00 *** plná úhrada 1 balení na 3 měsíce.

ZAVOLEJTE NÁM!

S NÁMI SI O STOMII MŮŽETE POVÍDAT TŘEBA CELÝ DEN.
ZEPTĚJTE SE NÁS NA COKOLIV.



O stomii víme vše.
V našem týmu pracují
zdravotní profesionálové
i samotní stomici.

Rádi vám pomůžeme, protože pomáhat nás baví.



800 122 111
pro volajícího zdarma



800 122 111
pro volajícího zdarma



[www.facebook.com/
stomikradim-convatec](https://www.facebook.com/stomikradim-convatec)

www
convatec.cz

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1