

# ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤

水様性の高い便性を素早くゲル化することで、  
衛生的な排泄物処理を可能にします。  
さらに、ポチャポチャ音やニオイ、ガスを  
軽減し、安心・安全をサポートします。

水様性排泄物の  
水分を素早くゲル化  
(吸収量の目安: 350ml)  
ニオイとガスを  
同時に軽減

## 排泄物の 飛散を削減

ストーマ袋の  
処理の際、排泄物の  
周囲への飛散を  
軽減できます。



## 日々のおでかけへの携行や、 災害時の備えとして



さまざまなトイレ事情や  
心配にも、  
アクティブワン™  
消臭コントロールシステムが、  
不快なニオイとガスを  
同時に軽減。  
スムーズな排泄と  
ニオイ問題解決を  
サポートします。

## 離れた場所への廃棄も安心

排泄物がゲル化されているので  
離れた場所での廃棄も  
スムーズで、介助者も安心。



### 新型コロナウイルス蔓延に対する ストーマケア時の対応指針

装具の排出口から水様便（イレオストミーやコロストミーにおける下痢）を排除する場合は、  
排泄物凝固剤を用いてゲル化しエアゾルを最小限にする等の工夫をする。<sup>※</sup>

# ダイヤモンド<sup>TM</sup> 消臭・吸収 ゲル化剤



100個入  
たっぷり常備で  
安心、快適

**携帯用**  
5個入  
安心、快適を  
いつも携帯

気になる  
ポチャポチャ音  
の軽減

水様便のゲル化で  
気になるポチャポチャ音  
を軽減します。

水様便を  
出し易い

水様便をゲル化させる  
ことで排泄物を  
出し易くします。

ニオイと  
ガスを  
同時に軽減

不快なニオイと  
ガスを同時に  
軽減します。

袋内の  
ガスによる  
膨らみを  
軽減

ガス抜きの心配が少なく、  
袋の膨らみを防ぎ、排泄処理  
の負担を軽減します。

## 使用方法

使い方は簡単！  
開封せずそのまま  
ストーマ袋へ  
ポンと入れるだけ。



数分後には水様性の排  
泄物がゲル化されます。  
また、手で袋を押さえる  
ことで形状を平たくでき  
ますので、服の上から目  
立ちにくくなります。  
※排泄物はトイレに  
破棄いただけます。

## ダイヤモンド<sup>TM</sup> 消臭・吸収ゲル化剤

● 100個入  
(携帯用ジップロック1枚入)

注文番号	税込価格
420791	4,180円



## ダイヤモンド<sup>TM</sup> 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用

● 5個入

注文番号	税込価格
420792	330円



注) 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 災害対策委員会 “新型コロナウイルス蔓延に対するストーマケア時の対応指針”. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会.  
<http://www.jsscr.jp/img/koronataisakushishinn.pdf>. (参照 2020-06-04).

※服薬、食事などの影響により、排泄物の成分上固まりにくくなる場合があります。

※この製品は消化管ストーマ用、消臭・吸収ゲル化剤です。キャップ式装具、**尿路ストーマには使用できません。**

※上記製品のご注文・お問い合わせに関しては、販売店へご連絡ください。



**convatec**

— よりそい、つながり —

**コンバテック ジャパン株式会社**

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-7

お客様相談窓口

**☎ 0120-532384**

<https://www.convatec.com/ja-jp/>