

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

สโตมาฮีซีฟพาวเดอร์

Stomahesive® Powder

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

Stomahesive® Powder เป็นผงแป้งละเอียดซึ่งเป็นวัสดุอุดความชื้น (ใช้ได้ทันทีและกักเก็บความชื้น) เมื่อสัมผัสกับความชื้น ผงแป้งจะเหนียวขึ้น

ข้อบ่งใช้

ใช้กับบริเวณที่เปียกชื้นเพื่อช่วยลดความชื้นที่เกิดขึ้นจากของเสีย

วิธีการใช้

ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ผงสโตมาฮีซีฟ ใช้ปริมาณผงเพียงเล็กน้อยและทิ้งส่วนเกินออก จากนั้นกดแป้นสโตมาฮีซีฟ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผงสโตมาฮีซีฟ ยังสามารถใช้เติมช่องว่างระหว่างผิวและแป้น

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ปิดฝาให้แน่นหลังจากใช้

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 025510 ใน 1 ขวดบรรจุ 1 ออนซ์ (28.3 กรัม)

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

LOT หมายถึง รุ่นการผลิต

EXP หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท ฟาร์มาแพค, เวอร์ริล, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000