

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

ไดมอนด์ ซองลดกลิ่นชนิดเจล

Diamonds™ Gelling and Odour Control Sachets

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ซองควบคุมการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ข้อบ่งใช้

ใช้เพื่อเปลี่ยนสารคัดหลั่งให้กลายเป็นเจลจากถุงทวารเทียมหรือถุงเก็บอุจจาระ เพื่อช่วยลดหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และคราบไขมันส่วนเกิน ใช้สำหรับอุจจาระเหลว

วิธีการใช้

- ใส่ซองทั้งหมดหนึ่งซองลงในถุงเก็บ ห้ามเปิดซอง
- ระบายทิ้งและกำจัดสารคัดหลั่งในถุงตามปกติ สามารถใส่ซองเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องใส่ของถุงเก็บหลังจากเททิ้ง
- โปรดทราบ: สารคัดหลั่งในถุงเก็บอาจมีสีเข้มกว่าปกติและ/หรืออาจมีเศษชิ้นเล็กๆ สีดำ
- นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่สามารถมองเห็นได้จากระบบควบคุมกลิ่น ActiveOne™ หากต้องการตรวจสอบสีของสารคัดหลั่ง ให้หยุดใช้งานชั่วคราว

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ หลังใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นอันตรายทางชีวภาพได้
- จัดการและกำจัดทิ้งตามหลักปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากในระหว่างการใช้อุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานในประเทศของคุณ

วิธีการเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420791 ใน 1 กระปุกบรรจุ 100 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



ผู้ผลิต



ตัวแทนในประเทศสหภาพยุโรป



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับอิเล็กทรอนิกส์



ห้ามใช้ซ้ำ



เก็บในสภาวะที่แห้ง



ห้ามรับประทาน



หมายเลขแคตตาล็อก



ผู้นำเข้า



เครื่องมือแพทย์



รุ่นการผลิต



ตัวแทนในประเทศสวีเดน



วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท วอลเทอร์ ฮอทตัน ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส เฟส 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000