

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เอสเซนต้า สเปรย์ปกป้องผิวหนัง

Esenta Sting Free Skin Barrier Spray

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สเปรย์ปกป้องผิวหนังชนิดไม่ระคายเคือง สำหรับใช้บริเวณรอบทวารเทียมและรอบบาดแผล

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับปกป้องผิวหนังไม่ให้ถูกทำลายจากของเสีย เอ็มไซม์ และคราบขาว

วิธีการใช้

1. ทำความสะอาดและเช็ดผิวให้แห้ง
2. ถือขวดสเปรย์ให้ห่างจากบริเวณที่จะทำการรักษาประมาณ 10 ซม.
3. พ่นกวาดเพื่อเคลือบให้สม่ำเสมอ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสเปรย์แห้งสนิทดีแล้วก่อนทาผลิตภัณฑ์ทาว เช่น อูปรกรณ์หรือแผ่นปิดแผล
5. ควรใช้สเปรย์ทุกครั้งที่เปลี่ยนแผ่นปิดแผลหรืออูปรกรณ์เพื่อการปกป้องผิวหนังที่ได้ผลดี

ข้อมูลการใช้

โดยปกติไม่จำเป็นต้องล้างออก อย่างไรก็ตามสเปรย์สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้เอสเซนต้าอูปรกรณ์ลอกคราบขาวทางการแพทย์

สามารถใช้ฉีดพ่นได้โดยให้กระป๋องคว่ำลง สามารถบรรเทาผิวที่แดงและเจ็บ และลดอาการคัน หากในระหว่างการใช้อูปรกรณ์นี้หรือจากการใช้อูปรกรณ์มี

เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานระดับประเทศของคุณ

ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการขีดโดยตรงที่บาดแผล
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคือง และปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง
- สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

คำเตือน

- ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ที่อัดด้วยความดัน: อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน เปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ - ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเจาะหรือเผาแม้ใช้แล้ว เก็บให้ห่างจากแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F เก็บให้เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

วิธีการเก็บรักษา

เก็บให้พ้นแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F

วัตถุไวไฟ

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 423288 ใน 1 กล่องบรรจุ 50 มิลลิลิตร

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



เครื่องมือแพทย์



ผู้ผลิต



ผู้นำเข้า



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับอิเล็กทรอนิกส์



คำเตือน



ระวังวัตถุไวไฟ



ห้ามใช้ซ้ำ



รุ่นการผลิต



หมายเลขแคตตาล็อก



วันหมดอายุ



เก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 50 °C

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท ไฮโดรเคมี แอโรซอล, เบอร์เคนเฮด, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000