

## โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

### เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เอสเซนต้า สเปรย์ลอกคราบการทางการแพทย์

ESENTA Sting Free Medical Adhesive Remover Spray

#### คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สเปรย์ลอกคราบการทางการแพทย์แบบไม่ระคายเคือง

#### ข้อบ่งใช้

ใช้ขจัดคราบการบนผิวหนัง

#### วิธีการใช้

1. ฉีดสเปรย์นิลแห่รอบๆ ขอบการแล้วรอสักครู่
2. ค่อยๆ ลอกการออกจากผิวหนังโดยฉีดสเปรย์เพิ่มเติมเพื่อให้ขจัดออกได้ง่าย หากจำเป็น

**ข้อมูลการใช้:** ทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่ สามารถใช้ฉีดพ่นได้โดยให้กระป๋องคว่ำลง หากในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานอุปกรณ์มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น

โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานระดับประเทศของคุณ

#### ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการฉีดโดยตรงที่บาดแผล
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวหนังอ่อนหรือผิวหนังบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคือง
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง
- สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

#### คำเตือน

- ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ที่อัดด้วยความดัน: อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน เปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ - ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเจาะหรือเผาแม้ใช้แล้ว เก็บให้ห่างจากแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F เก็บให้เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

#### วิธีการเก็บรักษา

เก็บให้พ้นแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F

#### วัตถุไวไฟ

#### ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 423289 ใน 1 กล่องบรรจุ 50 มิลลิลิตร

#### คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



เครื่องมือแพทย์



ผู้ผลิต



ผู้นำเข้า



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับอิเล็กทรอนิกส์



คำเตือน



ระวังวัตถุไวไฟ



ห้ามใช้ซ้ำ



รุ่นการผลิต



หมายเลขแคตตาล็อก



วันหมดอายุ



เก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 50 °C

#### เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

#### ผลิตโดย

บริษัท ไฮโดรคอม แอโรซอล, เบร์เคนเฮด, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000

SI2389TH1 วันที่ออกเอกสาร 19 มีนาคม 2567